

# 甘露醇加热器溶解结晶

产品名称	甘露醇加热器溶解结晶
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:FYL福意联 库存:现货 物流:送货上门
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

## 产品详情

甘露醇加热器，甘露醇恒温箱，溶解甘露醇加热器用途：甘露醇在低温环境中极易形成结晶，需要加温溶解后方可使用。以前遇到有结晶的甘露醇，就放入热水中浸泡，然后取出摇晃，甚加热煮沸，经常导致瓶签破损还费时费力。福意联甘露醇注射液防结晶保存柜，可用于已经结晶甘露醇在温度37~42度的环境里进行溶解，或25~27度的环境下保温，防止结晶现象的发生。

甘露醇加热器溶解结晶公司介绍：北京福意电器公司自成立以来一直受到了广大用户的青睐，北京福意电器公司主要从事实验室、医疗温度相关产品的开发、制造和经营业务。公司的产品广泛应用于：医药、化工、科学、化工，环保，实验室，检测等单位部门。快捷、优良的售后为客户彻底解除后顾之忧。多年来，福意联在做好自身产品售后及维修工作，与客户建立长久。互信、双赢的合作伙伴关系，在客户中树立了良好的形象。

甘露醇加热器溶解结晶参数：

【产品型号】 FYL-YS-151L

【产品形式】 立式

【噪 音】 42dB(a)

【功 率】 120W

【电 源】 AC220V，50Hz

【温度范围】 0-100 ，可调可控，根据您的要求任意设定

【外形尺寸】（宽×深×高）：595×570×865mm

【内部尺寸】（宽×深×高）：508×422×637mm

【有效容积】150L

【重量】64kg

【温度显示】LCD数字式显示，触控屏

【外门锁扣】内嵌式双锁

【产品型号】FYL-YS-281L

【噪音】46dB(a)

【功率】160W

【外形尺寸】（宽×深×高）：595×570×1445mm

【内部尺寸】（宽×深×高）：508×422×1218mm

【有效容积】280L

【重量】99kg

【产品型号】FYL-YS-4311L

【噪音】48dB(a)

【功率】200W

【外形尺寸】（宽×深×高）：595×675×1805mm

【内部尺寸】（宽×深×高）：508×537×1572mm

【有效容积】430L

【重量】129kg

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统。
- 2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。
- 3、门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。
- 4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。

- 5、适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。
- 6、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定所需温度，数字式显示，读数极为方便，控温精度高。
- 7、完善的报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、保证安全运行防止发生意外
- 8、采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加科学合理，使工作室内温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。
- 9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 11、箱体外壳均采用优良A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电防腐化喷塑处理,增加了外观质感和洁净度。
- 12、箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管，保证物品安全，
- 13、机器底部采用高可固定式PU万向轮。

甘露醇加热器溶解结晶说明：注意事项/甘露醇注射液

- (1) 除作肠道准备用，均应静脉内给药。
- (2) 甘露醇遇冷易结晶，故应用前应仔细检查，如有结晶，可置热水中或用力振荡待结晶完全溶解后再使用。当甘露醇浓度高于15%时，应使用有过滤器的输液器。
- (3) 根据病情选择合适的浓度，避免不必要地使用高浓度和大剂量。
- (4) 使用低浓度和含化钠溶液的甘露醇能降低过度脱水和电解质紊乱的发生机会。
- (5) 用于治疗水杨酸盐或巴比妥类药物中毒时，应合用碳酸氢钠以碱化尿液。