

# 博达-中医穴位埋线针

产品名称	博达-中医穴位埋线针
公司名称	山东博达医疗用品股份有限公司
价格	999.00/包
规格参数	品牌:博达 型号:2-0 3-0 4-0 产地:山东博达医疗用品股份有限公司
公司地址	单县单砀路东端
联系电话	15965888505

## 产品详情

- 1.患者俯卧或仰卧位，露所需埋线部位。
- 2.用 75%酒精或碘伏消毒局部皮肤，选择穿刺点
- 3.确认包装无破损且在灭菌有效期内，打开包装，取出埋线针，取下保护套，将可吸收线从针尖处放入《可用摄子》针管(注意线体一定要完全置入管内，不可露在针尖外面)，左手定位，右手指捏住针座两侧，进行穿刺《侧孔针和平口针需要先用破皮针破皮后再穿刺》穿刺时注意埋线针的刻度线，根据穴位解剖特点进一步伸入到穴位适宜深度，当达到预定部

你或深度时停止穿刺。

- 1.选带衬芯的埋线针穿刺时，按下衬芯座，边推针芯边退针管，将可吸收线埋置在穴位的肌层或皮下组织内，确认线体注入后，将埋线针拔出。
- 5.选择“线体对折旋转埋线术”时，用不带衬芯的埋线针，取一段可吸收性外科缝线,放入针的前端,线在孔内孔外的长度基本保持相同,刺入穴位时,线在针尖处被压成对折,在确保针孔外的线体进入皮肤并张得针感后，旋转针体 360°后,退出针体
- 6.出针后，立即用干棉球压迫针孔片刻，并敷医用输液胶贴。

[]

- 1.五岁以下的儿童、孕妇、有出血倾向者、凝血机制障碍者及过敏体质者。
- 2.皮肤破损处、关节腔内。
- 3.过度紧张和搬劳。

