

西臣邦尼止血贴 压力型止血贴

产品名称	西臣邦尼止血贴 压力型止血贴
公司名称	江苏西臣邦尼医疗器械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:西臣邦尼 型号:DM120
公司地址	建湖县民营科技创业园4号路88号
联系电话	025-86221732 18851711471

产品详情

【产品名称】止血贴

【型号规格】型号：DM120 规格：27mm × 16mm × 8.5mm

【主要结构】止血贴由高分子棉垫、加压板和弹力胶带组成。

【产品性能】止血贴采用高分子棉垫直接接触伤口面，在位于高分子棉垫上方的加压板和弹力胶带的压力下压迫止血，而加压板的设计消除了被压迫处远端肢体的水肿与血液循环障碍，从而安全有效的恢复患者的伤口。

【适用范围】适用于动脉、静脉压迫止血。

【使用方法】止血贴由高分子棉垫、加压板和弹力胶带组成，使用人员不需专门培训，阅读产品说明书后即可。

- 1、拆包取出止血贴，用手捏住加压板两侧；
- 2、让高分子棉垫对准覆盖血管穿刺部，用一只手的大拇指压住止血贴，另一只手准备拔出留置针；
- 3、拔针的同时要继续用大拇指用力按住止血贴，待针拔出以后，继续用力按压并把保护纸撕开一部分，把胶带拉长约1-2cm；
- 4、继续用力按压，并把胶带靠近高分子棉垫端的部分牢固的黏贴在皮肤上，再把未撕完的保护纸全部撕掉紧紧黏贴好；
- 5、然后换另一只手的大拇指继续用力按住止血贴，并注意防止高分子棉垫偏移，用同样的方法

把另一侧的胶带黏贴好；

6、完全黏贴好以后把开始黏贴的时间记录好，止血所需的时间因人而异，通常30-60分钟左右便可止住血。

【注意事项】

- 1、使用过程中，若创口出现临床感染或麻痹、不适等症状，请停止使用并采取适当治疗；
- 2、为避免伤及血管和皮肤，请拔出针头之后方可开始黏贴，黏贴时，胶带拉长长度须参照使用说明，不宜拉得过长；
- 3、为尽可能避免对皮肤造成不适，本品黏贴时间不得超过2小时；
- 4、使用过程和使用完撕开时，都务必由医护人员操作，且撕开后应持续观察几分钟，若血仍未完全止住，请采取适当方法继续止血；
- 5、使用完本品后，为防止感染，应对创口部位进行覆盖保护；
- 6、若发现本品包装袋破损、高分子棉垫污损或弄湿等现象，请勿使用。

【禁忌症】禁止重复使用。

【储存】防晒、阴凉、干燥、通风的环境下保存。

【有效期】24个月