

低温环氧乙烷灭菌柜 医疗器械消毒设备80L120L220L

产品名称	低温环氧乙烷灭菌柜 医疗器械消毒设备80L120L220L
公司名称	河南省强人净化工程有限责任公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:三强 型号:SQ-H 用途:消毒消毒设备
公司地址	河南省安阳市滑县滑县新区漓江路与古城路交叉口东南角三强园区（注册地址）
联系电话	0372-5577505 18803722636

产品详情

低温环氧乙烷灭菌柜 医疗器械消毒设备80L120L220L360L

环氧乙烷灭菌技术已经成为医院怕热怕湿医疗器械灭菌的主要选择的方法之一,而小型环氧乙烷灭菌器则是实现医院选择该灭菌方法的主要类型装置。目前,市场上出现的台式环氧乙烷灭菌器体积较小,使用方便,很适合少量灭菌物品的场所,已为不少二三级医院所配备。

为了解此类环氧乙烷灭菌器装置的实际灭菌效果情况,我们选择一种小型台式环氧乙烷灭菌器,就其实际灭菌效果以及灭菌过程中环境中环氧乙烷的浓度情况进行了试验观察。现将结果报告如下。试验材料试验用环氧乙烷灭菌器为EO-2型环氧乙烷灭菌器,容积300L,分4层放入载物架。

灭菌器工作方式采用非压力型,灭菌过程不需要真空处理。灭菌用环氧乙烷为液体安瓿制剂,每支安瓿内装环氧乙烷20g。生物指示剂为枯草杆菌黑色变种芽孢制作的自含式生物指示剂管,模拟现场灭菌试验用该芽孢悬液。

规格：23L、80L、120L、220L、360L、460L、600L、800L、1立方、2立方、3立方、4立方、5立方、6立方

使用操作方法：

- 1、检查注水软管与溢流排放管路安装是否牢固。
- 2、接通电源然后开启电源开关，进入运行界面点击“手动”按键。
- 3、打开水源阀门，之后按下“加水”键并观察溢流口是否有水溢出。当溢流口有水溢出，马上关闭水源阀门并复位“加水”键（初次使用或分解箱无水按此步骤手动加水）。

- 4、打开灭菌器门，观察灭菌室是否清洁干净，禁止带异物消毒。
- 5、把环氧乙烷小气罐放入储罐位置。
- 6、将被消毒物品装在医用包装袋(可保被消毒物品保质期2年)中，并在袋中放入EO指示卡，封好后松散地放在载物架上，消毒物品占灭菌室80%空间为最佳。
- 7、检查以上操作是否有遗漏然后将门锁紧。
- 5、选定“自动”键，本机即可进入设定常用灭菌程序工作状态。
- 6、当工作室温度达到一定值后，该机自动进入抽真空状态，真空压力达到-60kpa后，系统自动注药。当检测药量达到设定值时，设备继续升温。
- 7、温度升至设定值，灭菌器开始计时。从设置的灭菌时间运行至0.00时，该机自动进入排残气状态，按设定排残次数完成后，设备报警提示灭菌完成。此时时间显示为0：00，排残次数显示为0，温度、湿度、压力显示实际值，全部灭菌过程结束。
- 8、所有工作完毕之后关闭电源，关闭水源，完成灭菌全过程。
- 9、另外，根据被消毒物品的特殊需要，本机同时可任意设定相应参数。

您好！欢迎光临厂家店铺，精准规格尺寸请咨询服务热线了解，谢谢