

# 135度卫浴两用扶手 残疾人无障碍扶手 优质不锈钢老人扶手

产品名称	135度卫浴两用扶手 残疾人无障碍扶手 优质不锈钢老人扶手
公司名称	衡水金纳新型建材有限公司
价格	40.00/件
规格参数	规格:400*400 颜色:白色、黄色 型号:135度扶手
公司地址	河北省衡水市景县景州镇张戈侯橡塑管业基地331号（注册地址）
联系电话	15632895658

## 产品详情

135度卫浴无障碍扶手@洛阳卫浴无障碍扶手@卫浴无障碍扶手生产厂家

一、卫生间无障碍扶手用途：卫浴扶手是安装在卫生间或浴室，用来保持身体平衡或支撑身体的横木或把手。可以有效地避免老人及儿童在湿滑的地面摔伤、滑到。

二、卫生间无障碍扶手优点：

- 1、坚固耐用，流线型设计，简洁实用。
- 2、稳定性很强，密度高，分量重，经过电镀抛光后不剥落，不褪色，在潮湿的环境下也不易生锈，不易老化，整体结构不松动。
- 3、耐腐蚀，耐高温和耐低温，稳定性强，不褪色，抗磨损功能，结合力佳。
- 4、表面镀亮铬，质感完美，镀层结合力强，不锈蚀，无剥落。具有高强度的抗腐蚀、抗磨损功能，结合力佳，镀层均匀，视感厚实，且表面色泽光亮如镜。

三、卫生间无障碍扶手使用与安装

- 1、扶手平直安装：首先需在墙壁上钻孔，然后将扶手放上去用电钻把螺丝拧紧，如果有拐直角，可以切45°角对接，可以直接，也可以斜接，用AB胶粘上，然后用螺丝拧紧。
- 2、接口处理：如果是直的，只需拿铁锯割齐就可以对接，如果是旋转的需顺着铁艺的弧度切，然后用AB胶，和用手动砂轮磨出扶手粉末混合涂在接口处，等干了以后，用360粗砂纸磨平，跟扶手顺上。

