

高级10寸平板电脑心肺复苏模拟人（无线版）

产品名称	高级10寸平板电脑心肺复苏模拟人（无线版）
公司名称	上海欣标科教设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区四团镇平港路883-885号2幢1666室
联系电话	18917323763

产品详情

无线版高级10寸平板电脑心肺复苏模拟人 平板电脑心肺复苏模型

产品介绍:

执行标准：美国心脏学会（AHA）2015国际心肺复苏（CPR）&心血管急救（ECC）指南标准材料特点：模拟人面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发，采用进口热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢模具、经注塑机高温注压而成，具有解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形、拆装更换方便等特点，其材料达到国外同等水平。CPR模拟人功能：模拟人与平板电脑无线连接。采用平板电脑控制：模拟心电图显示、矩形图表数据统计、CPR操作动画显示，全程中文语音提示。模拟生命体征：初始状态时，模拟人瞳孔散大，颈动脉无搏动。按压过程中，模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致。抢救成功后，模拟人瞳孔恢复正常，颈动脉自主搏动。可进行人工呼吸和心外按压。可进行标准气道开放，气道指示灯变亮。三种操作方式：可进行CPR训练、模式考核和实战考核。方式一：CPR训练，可进行按压和吹气训练。方式二：一键考核，在设定的时间内，根据2015国际心肺复苏标准，正确按压和吹气数30：2的比例，完成5个循环操作。方式三：实战考核，自行设定操作时间范围、操作标准、循环次数、操作频率、按压次和吹气的比例。条形码显示吹气量：正确的吹气量为500~600ml-1000ml：吹气量过少时，条形码为黄色。吹气量合适时，条形码为绿色。吹气量过大时，条形码为红色。吹入的潮气量过快或超大，造成气体

进入胃部指示灯显示；数码计数显示；错误语言提示； 条形码显示按压深度，正确的按压深度5-6cm
：按压深度过少时，条形码为黄色。按压深度合适时，条形码为绿色。按压深度过大时，条形码为红色
。 可自行设定操作时间，以秒为单位。 操作频率：2015标准为100-120次/分钟，可自行设定数值。
电源状态：USB供电，如遇到USB供电不足时，请外接电源，外接电源接口在人体模型的腰部
左侧，外接电源为直流5V2A.标准套配置： 高级复苏全身人体模型一具 豪华手拉式人体硬塑箱一
只 10寸平板电脑一台 复苏操作垫一条 屏障面膜（50张/盒）一盒 可换肺囊装置四套
可换面皮一只 国际最新操作指南光盘1盘 现场急救常用技术使用手册1本 使用说明书一本
保修卡、合格证