

# 高级多功能护理急救训练模拟人（心肺复苏、男女导尿、手臂静脉穿刺）

产品名称	高级多功能护理急救训练模拟人（心肺复苏、男女导尿、手臂静脉穿刺）
公司名称	上海欣标科教设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区四团镇平港路883-885号2幢1666室
联系电话	18917323763

## 产品详情

高级多功能护理急救训练模拟人(心肺复苏导尿手臂静脉穿刺) 多功能急救护理模型人

产品介绍:

高级多功能护理急救训练模拟人（心肺复苏、男女导尿、手臂穿刺功能）是集国外同类产品之长处及公司科技人员的共同努力最新开发研制的高级多功能护理急救训练模拟人。模型包含以往心肺复苏急救功能外还另增加了基础护理技能功能的两种组合为一体成人CPR训练模拟人，产品结合2015国际心肺复苏操作指南标准，突出CPR训练操作的辅助功能，以及可自行设定各项操作值，更加符合临床和教学练习CPR操作要求。其核心模块包括成人模型人、心肺复苏显示控制器，可进行心肺复苏的训练和考核。实现瞳孔变化、颈动脉搏动、气道开放等心肺复苏施救成功的必要条件。适用于社会心肺复苏普及培训机构与医学院校、医疗卫生系统、电力系统单位、工矿企业、交通部门单位等各种需要现场救生技术的单位部门进行急救心肺复苏培训使用。其造型更完美、功能更强大、操作更方便的领先产品。

执行标准：美国心脏学会(AHA)2015国际心肺复苏(CPR) & 心血管急救(ECC)指南标准

功能特点：

模拟人解剖特征明显，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美观。

模拟生命体征：

- 1) 初始状态时，模拟人瞳孔散大，颈动脉无搏动。
- 2) 按压过程中，模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致。
- 3) 抢救成功后，模拟人瞳孔恢复正常，颈动脉自主搏动。

4) 瞳孔缩放和颈动脉搏动由开关可开启和关闭。

可进行人工呼吸和心外按压。可进行标准气道开放，气道指示灯变亮。

三种操作方式：可进行CPR训练、模式考核和实战考核。

1) 方式一：CPR训练，可进行按压和吹气训练。

2) 方式二：模式考核，在设定的时间内，根据2015国际心肺复苏标准，正确按压和吹气数30：2的比例，完成5个循环操作。

3) 方式三：实战考核，老师可自行设定操作时间范围、操作标准、循环次数、操作频率、按压和吹气的比例。

控制器显示屏功能：

电子监测：电子指示灯显示监测气道开放和按压部位。人工呼吸和胸外按压的正确次数计数和错误次数计数。

语音提示：训练和考核中全程中文语音提示，可开启和关闭语音，调节音量。

条形码显示吹气量：正确的吹气量为500~600ml-1000ml：

1) 吹气量过少时，条形码为黄色。

2) 吹气量合适时，条形码为绿色。

3) 吹气量过大时，条形码为红色。

4) 吹入的潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示；数码计数显示；错误语言提示；

条形码显示按压深度，正确的按压深度5-6cm：

1) 按压深度过少时，条形码为黄色。

2) 按压深度合适时，条形码为绿色。

3) 按压深度过大时，条形码为红色。

可自行设定操作时间，以秒为单位。

操作频率：国际最新标准：至少100次/分；也可自行设定数值。

电源状态：采用220V电源，经过稳压器稳压后输出电源12V。

基础护理操作：

手臂静脉穿刺、注射、输液

三角肌皮下注射

股外侧肌注射

灌肠法

女性导尿术

男性导尿术

女性膀胱冲洗

男性膀胱冲洗

臀部肌肉注射

整体护理：擦洗、穿换衣服

打印机功能：

操作结束后打印操作过程。成绩单内容涵盖操作方式、意识判断、急救呼吸、脉搏检查、检查呼吸、清除异物、操作频率、按压与吹气比例、循环次数、每个循环操作中按压和吹气的次数、按压正确/错误次数、按压错误的原因和次数、吹气正确/错误的原因和次数、吹气错误的原因、设定时间、操作时间和考核评定。

材料特点：

模拟人面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发，采用进口热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢模具、经注塑机高温注塑而成，具有解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形，拆装更换方便等特点，其材料达到国外同等水平。

标准套配置：

高级复苏全身人体模型一具；

高级显示控制器一台；

复苏操作垫一条；

电源适配器一根；

数据线一根；

CPR消毒面膜(50张/盒)一盒；

可换肺囊装置四套；

可换面皮一只；

热敏打印纸二卷；

国际最新操作指南光盘1盘；

现场急救常用技术使用手册 1 本；

使用说明书一本；

保修卡、合格证；