

# 艾暖医用冰帽化疗冰帽物理降温冰帽冷敷冰帽

产品名称	艾暖医用冰帽化疗冰帽物理降温冰帽冷敷冰帽
公司名称	青岛沃普艾斯日用品有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:Inuan/艾暖 型号:700g 产地:山东省青岛市
公司地址	青岛市市南区香港中路18号福泰广场A1002户
联系电话	18863996556 18863996556

## 产品详情

产品说明：

规格：700g

使用期限：4年

生产备案号：鲁青食药监械生产备20150011号

产品技术要求编号：鲁青械备2016218号

安全说明：未发现不良反应贮存：于阴凉干燥且无腐蚀气体处存放，避免阳光直射，冷藏效果更佳（勿冷冻保存）。利用交通工具常温下运输，防止雨淋

产品优势：

- 1.大小适中，成人儿童均可使用。
- 2.内容物为安全无毒的特殊凝胶，采用针织布压延无毒无味的PVC制成，安全无毒，对皮肤无刺激，可放心使用。
- 3.柔软舒适，凝胶内容物降温时间长，且长期冷冻柔软不结冰，可循环使用。

产品性能：

由冰袋和各种形式的外套、固定带组成，冰袋内有冷敷凝胶或蓄冷剂。用于人体表面特定部位。

适用范围：

用于物理退热、冷敷理疗。仅用于闭合性组织。

产品特点：

- 1、适用于医院临床颅脑外科手术，降低脑代谢，减少脑部损伤，以及高烧、脑溢血、偏头痛及癌症患者化疗等物理降温的临床应用。
- 2、对病人起到毛细血管收缩进而防止脱发，亦可同时缓解病人的痛症等。
- 3、对于头痛发高烧、头晕目眩等，并能有效纾缓面部神经，可起松弛神经，提神醒脑，头部不适者，冷冻后戴在头部。
- 4、冷敷帽比传统降温产品更方便、更安全、更有效、更舒适。

注意事项：

本品不可直接与人体皮肤接触，请用毛巾或棉布包裹，以免温度过低，造成冻上；

- 1、老人、婴幼儿及身体虚弱不能比表达自己意愿的人，要经常检查冷敷部位，防止冻伤；
- 2、 $-15 \pm 5$  冷冻预冷时，注意冷冻时间和温度变化，医用冰帽温度不得低于 $0$  ；
- 3、本品使用前应遵循医嘱；
- 4、禁止用尖锐物化伤本品，冰帽破损渗漏请勿继续使用；
- 5、如内容物沾到皮肤、衣物等，请及时用温水清洗，如不慎入眼，请及时用清水清洗。

使用说明：

冰帽放置在 $4 \pm 1$  恒温环境中12h，或在 $-15 \pm 5$  冷冻15-20min，将医用冰帽取出使用。