

艾暖医用冷敷头带冷敷降温头带退烧退热头带

产品名称	艾暖医用冷敷头带冷敷降温头带退烧退热头带
公司名称	青岛沃普艾斯日用品有限公司
价格	.00/盒
规格参数	品牌:Inuan/艾暖 型号:OPIS-CH-IC 产地:山东省
公司地址	青岛市市南区香港中路18号福泰广场A1002户
联系电话	18863996556 18863996556

产品详情

产品说明：

规格型号：OPIS-CH-IC 80g

包装：1个/盒有效期：四年备案号/产品技术要求编号：鲁青械备20150066号

贮存方法：包装后的冷敷头带，应置于阴凉干燥处存放

产品优势：

外包材：由尼丝纺跟PVC压合而成。尼丝纺具有防辐、防霾、防水三大特性，安全无刺激；PVC压合胶采用绿色环保材质，健康无毒，宝宝使用更加放心。

内材料：采用从日本引进的高分子材料，安全无毒，具有吸热多持续时间长的优势；性状稳定，-20 °不结晶，依然是胶体状；用热水导热之后可用于热敷，性状稳定，不会出现泄漏涨包等意外现象。

可重复使用，冷敷头带头围可调节，适合不同年龄段的人使用。

本品内容物主要成分为食用羧甲基纤维素钠、高吸水性树脂材料、纯水等。

产品性能：

由冰袋、外套、固定带组成，冰袋内装有冷敷凝胶或蓄冷剂。

预期用途：

适用于预冷后发热患者的物理降温，本品不直接接触皮肤。

产品特点：

- 1、物理降温，冷敷后局部血管收缩，起到散热的作用，有效防止高热对脑细胞的损伤。能够迅速消除发热、中暑等不适感。
- 2、快速消肿，冷敷能够使血管收缩，有效阻断挫伤血管血液渗入周围组织，能够减轻局部发青及肿胀。
- 3、对于感冒及其他原因引起的发烧、发热，辅助性治疗及应急物理降温作用；缓解发烧引致的不适。

注意事项：

- 1.本品不与人体皮肤直接接触，请用毛巾或棉布包裹，以免温度过低，造成冻伤；
- 2.对婴幼儿、昏迷患者等不能表达自己意愿的人，要经常检查冷敷部位，防止冻伤；
- 3.使用本品前应咨询医生或遵医嘱；
- 4.禁止用尖锐物划伤本品，冰袋破损渗漏请勿继续使用；
- 5.如内容物沾到皮肤、衣物等处，请及时使用温水洗净，万一溅入眼睛，请及时用清水冲洗。

使用说明：

冷敷头带放置在 4 ± 1 恒温环境中12h，或在 -15 ± 5 冷冻15-20min，将冷敷头带固定在需要冷敷的部位。