

艾暖热敷暖宫贴暖宝宝贴发热贴暖贴暖宝宝批发源头工厂

产品名称	艾暖热敷暖宫贴暖宝宝贴发热贴暖贴暖宝宝批发源头工厂
公司名称	青岛沃普艾斯日用品有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:Inuan/艾暖 型号:96*130mm 产地:山东省
公司地址	青岛市市南区香港中路18号福泰广场A1002户
联系电话	18863996556 18863996556

产品详情

产品说明：

规格型号：96mm × 130mm 包装：内装5贴有效期：2年执行标准：YZB/鲁0273-2014注册证号：鲁食药监械（准）字2014第2260242号许可证号：鲁食药监械生产许20130093号贮存方法：请放置阴凉、干燥、通风处、避免强光直射

产品性能：

暖宫贴厂家艾暖采用的内材料的主要是由高浓缩发热料、无纺布袋、粘帖明胶、外包装袋组成。其中高浓缩发热料由铁粉、水、活性炭、蛭石、食盐、高分子吸水树脂组成。产品自行发热，升温时间 10min，温度 70℃，发热持续时间 8h,温度保证时间 > 持续时间的40%。

产品优势：

1、外包材：正面--选用优质水刺布，柔软细腻，具有高透气性，低起毛性，无化学添加剂，安全无刺激，减少皮肤的过敏性。艾暖暖宫贴背面独有的印花图案，外加inuan精美LOGO防伪标识，美观优雅大方。背面--背胶采用德国汉高胶黏剂，无苯无毒，在保证产品更加贴合的同时，避免了过敏现象，更加安全可靠。印花贴纸，印有艾暖防伪标识，简洁美观。

2、内材料：主要由三部分组成 A铁粉 B活性炭 C保水剂。A、铁粉：采用由莱钢集团提供的二次还原铁粉，经高温提炼，祛除有害杂质，纯度高达97%，具有发热快，持续时间长的特点。B、活性炭：采用原生碳(别家采用再生碳)，更加健康绿色环保。C、保水剂：具有强吸附性、导热性、透析性，更好的促进皮肤吸收。

预期用途:

暖宫贴适用于女性经期小腹冷痛、月经失调、产妇暖宫、流产暖宫，软组织损伤、关节疼痛、腰腿痛、胃寒、肩周炎、颈椎病的辅助治疗，厂家提醒:：本品不可与皮肤直接接触。

产品特点：

- 1、强劲热力，缓解疼痛，消除淤肿
- 2、对于风湿骨痛等常年病痛，可配合药物，内服外用，达到更理想的治疗效果。
- 3、温宫护巢，有效缓解宫寒、痛经、月经不调等不良症状，对于小产及产后的子宫恢复起到很好的辅助作用，有活血化瘀，温经止痛、改善血液循环的良好功效。

使用说明:

- 1.使用艾暖暖宫贴时，沿缺口处撕开外包装袋，取出内袋，待几分钟升温后剥去剥离纸；
- 2.将上面的粘帖明胶贴附（在需要热敷部位内衣外侧用手铺平即可）

注意事项:

暖宫贴属于一次性发热产品，拆封后即开始发热，不使用产品时请勿拆开包装。

- 1、请注意低温烫伤，低温烫伤是指：将比体温高的发热体长时间与身体接触，会引起红斑、水泡等症状的烫伤，如出现此症状请立即停止使用，建议请医生就诊。
- 2、防止低温烫伤要注意：避免长时间将暖宫贴敷于同一个地方;请不要就寝时实用;请不要和供暖设备仪器使用。
- 3、请勿入口，如误食请马上漱口并立即请医生就诊。
- 4、孕妇及婴幼儿忌用。
- 5、皮肤病、糖尿病、高热患者、生活不能自理者慎用。
- 6、请不要放置在儿童能够触及的地方。
- 7、本品为一次性使用，使用过程中如感觉温度过高应立即取下暂停使用。
- 8、本品不与皮肤直接接触，使用暖宫贴时请隔衣物实用。