

低温等离子灭菌器 医用器械手术包快速消毒设备

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 低温等离子灭菌器 医用器械手术包快速消毒设备 |
| 公司名称 | 河南省强人净化工程有限责任公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:三强 型号:SQ-D 用途:消毒消毒设备 |
| 公司地址 | 河南省安阳市滑县滑县新区漓江路与古城路交叉口东南角三强园区（注册地址） |
| 联系电话 | 0372-5577505 18803722636 |

产品详情

低温等离子灭菌器 医用器械手术包快速消毒设备

低温等离子灭菌器

是现代医院、研究所等地常用的一种低温、等离子灭菌设备，在低温等离子灭菌器工作过程中，如果误操作或是对于不适采用该办法进行灭菌的物体将会造成灭菌失败的结果，那么低温等离子灭菌器在工作中要注意哪些问题呢？

低温等离子灭菌器的应用须知：

- 1、灭菌前,必须将所有器械彻底清洗和干燥,否则可能导致灭菌不彻底或灭菌程序被取消。
- 2、请使用灭菌器专用的器械盒,无纺布,灭菌袋。化学指示卡,生物培养指示剂等耗材。

- 3、医用无纺布建议重复使用次数不要超过2次。包裹器械盒时,建议医用无纺布的包裹层数为2层。内含化学指示灭菌包装袋不能重复使用（即密封袋）。
- 4、如灭菌程序未运行完成或被终止，必须将器械重新打包，并使用新化学指示条，化学指示胶贴，和生物培养指示剂重新灭菌和培养。
- 5、仔细检查器械的完好性，若有破损，请立即取出，不可采用本设备灭菌。（因为破损的器械不能承受压力以致无法达到灭菌效果）。
- 6、使用含氯(Cl)等卤元素试剂清洗过的器械，经本设备灭菌后可能导致器械受损。
- 7、器械盒务必用无纺布包裹后,方可放入灭菌舱内。严禁直接使用棉布包裹手术器械进行灭菌。
- 8、装入灭菌器内的物品之间应保持一定间隙。
- 9、不适用于以下器械的灭菌处理:
 - a不完全干燥的物品。
 - b吸收液体的物品和材料。
 - c由含纤维素的材质制成的物品或其它任何含有木质纸浆的物品。
 - d一头闭塞的内腔
 - e液体或粉末。

f一次性使用的物品,

g植入物。

h不能承受真空的器械。

i标示为仅使用压力蒸汽法灭菌的器械。

j器械具有内部部件且难以清洁的器械。

k器械的材质会与过氧化氢产生化学反应并且会影响到器械正常使用的器械。

l含有棉、纸或亚麻、浮松布巾、纱布海绵等纤维素材料制成的物品以及任何含有木浆的物品。

m纸质器械计数表册或批次粘胶标签。

n物品本身表面会互相压塌在一起的物品,除非可以采用使物品表面保持分离的方法。

操作规程：

(1) 待灭菌物品要满足使用说明书中“灭菌范围”的规定，要严格按照使用说明书中“灭菌前物品处理”的规定进行操作。

(2) 完整的操作遵循以下步骤:电源按钮开关（开机）----开关门----开门----装载物品----关门----运行程

序、数据打印----灭菌结束----开门----取出物品、放回灭菌篮筐----关门----关机

(3) 每天最后一锅完成后用洁净的干布清洁灭菌筐。

您好！欢迎观临厂家店铺，价格详情和规格参数请咨询服务热线了解，谢谢