

艾暖冷敷眼罩热敷眼罩冷敷消肿眼罩遮光眼罩

产品名称	艾暖冷敷眼罩热敷眼罩冷敷消肿眼罩遮光眼罩
公司名称	青岛沃普艾斯日用品有限公司
价格	.00/盒
规格参数	品牌:Inuan/艾暖 型号:OPIS-YZ-I C 80g 产地:山东省
公司地址	青岛市市南区香港中路18号福泰广场A1002户
联系电话	18863996556 18863996556

产品详情

【产品名称】冷敷眼罩

【型号规格】OPIS-YZ-I C 80g

【结构组成】由冰袋和外套组成，冰袋内装有凝胶。

【适用范围】用于眼睛局部冷敷。

【禁忌症】对本品过敏或有开放性伤口的情况下禁用。

【注意事项】

- 1.本品仅用于闭合性软组织，使用本品前应咨询医生或遵医嘱；
- 2.冰袋不与人体皮肤直接接触，使用时请套上外套，以免温度过低，造成冻伤；3.对昏迷患者等不能表达自己意愿的人，要经常检查冷敷部位，防止冻伤；
- 4.禁止用尖锐物划伤本品，冰袋破损渗漏请勿继续使用；
- 5.如冰袋内容物沾到皮肤、衣物等处，请及时用温水洗净；万一溅入眼睛，请及时用清水冲洗，并咨询医生；
- 6.(-15±5) 冷冻预冷时，请注意冷冻时间和温度变化，切勿长时间冷冻保存。

【特别提醒】

1.请置于婴幼儿不易触及处，以免发生误食等意外；

【使用说明】冰袋放置在 (4 ± 1) 恒温环境中12h，或在 (-15 ± 5) 冷冻15min~20min后，将其取出套上外套，佩戴在眼部。

【贮存方法】应贮存在无腐蚀性气体、阴凉干燥、通风良好、清洁的环境中，避免阳光直射。

【执行标准】Q/0285WPA045

【产品有效期】三年