

霏栎德远红外生物频谱按摩足浴桶

产品名称	霏栎德远红外生物频谱按摩足浴桶
公司名称	徐州霏栎德桑拿设备有限公司
价格	688.00/台
规格参数	尺寸加热系统:450*350*650m 加热系统:碳纤维发热板、远红外 计时范围:0-60分钟
公司地址	泉山区新淮海西路万科淮海新天地三街区H3-1415
联系电话	0516-89873626 18251598266

产品详情

生物频谱足浴桶

产品材质：进口加拿大铁杉

控制系统：电脑微型控制面板

加热系统：碳纤维发热板、远红外

足底养生系统：按摩轮

功率：240W
电
源：220V/50HZ

相对温度：常温---60

计时范围：0-60分钟

净重：8.5KG
毛
重：7.5KG

KRD-301S按摩桶

尺寸：450*350*270mm

电压：220V

功率：180W

KRD-304

尺寸：450*350*650mm

功率：180W

KRD-303

功率：280W

KRD-306按摩桶

尺寸：450*350*680mm

KRD-308按摩桶

KRD-T4

尺寸：400*550*720mm

足浴桶材质：采用进口杉木，具有抗菌、防臭、防霉、防水、防漏气，密封性能极佳，且不变形，外观光泽明亮，立体感强。

一、简介

足，人的“第二心脏”足疗又称发射区按摩法，是通过按摩刺激与人体内脏、器官、组织相对应的足部发射区，促进足部皮下毛细血管旺盛，调节人体内脏器官功能，达到健身、防病、治病的方法。

自古以来，人们就意识到赤脚在地上行走有益于健康，实践证明不常走路、不常运动的人，体内血液循环就差，这就加速了人体的衰老，要维持身体的健康每天至少要走一万步，由于生活水平的提高，交通工具的发达，人们运动双脚的机会越来越少，其结果危害了身体健康。

频谱足浴桶的诞生解决了传统疗法和现代人运动少的困惑，在家里，办公室里就能够轻松、安全的享受频谱足浴桶带来的健康。

1、足浴桶原理

足浴桶依据脚部发射区与人体各器官健康紧密联系，产品将整个脚部发射区处于与人体器官接近的频谱场能量内，有效刺激脚底各穴位，通过频谱波穿透人体皮肤和脏器，从而改善与提高身体机能和突破亚健康，达到自我保健之功效。

2、功效与作用

- 1.有效缓解各种痛症，解除疲劳，恢复元气，有利于夜间睡眠。
- 2.能促进新陈代谢，调节身体机能，从而达到减少脑血管疾病的发生。
- 3.降低血液粘稠度，肥胖的人和老年人血液呈高粘滞状态，流动缓慢，尤其是平常运动量少、血液粘度高的人，通过本产品的使用，可以促进血液循环，降低血液粘稠度，使血液流动朝正常状态转化，最后达到良性循环。
- 4.具有很好的保健、美容、延缓衰老等作用。

二、产品介绍

一种新型的足疗方式正在国内兴起，它采用生物频谱能量和远红外线发热膜相结合的方法进行日常足疗保健。此产品融合了日光浴和频谱疗法的优点，发射出的频谱能量通过远红外线产生共振，通过热量，让人享受大汗淋漓的畅快，同时加速了体内新陈代谢，活化细胞，疏通经络，调整人体微循环的作用。频谱能量足浴桶不用水，使用方便。使用占地不到0.5平方米，可在家里、办公室等许多地方使用。

三、使用方法与功能

足浴方式 新型远红外线发热膜和生物频谱能量相结合的方法。

预热时间 3—5分钟 预热3—5分钟可使用，视环境温度而定。

使用注意事项：

- 1.请勿让无自我意识者、自己无法操作者、婴幼儿使用；
- 2.感觉不舒服或者身体和肌肤感到异常时，请立即停止使用，并咨询医生。
- 3.请勿长时间使用，恐怕会在成低温烫伤。
- 4.使用时，若穿在足部有金属拉链的裤子时，请将裤链拉上，若带有脚链亦取下，因金属遇热会发烫。
- 5.饮酒后或者服药者，禁止使用。
- 6.勿坐在或站在产品上。
- 7.勿在浴室内或者湿气多的地方使用及保管。
- 8.勿在产品里加水或用水清洗。
- 9.搬运产品时，请用双手搬运，以免造成产品滑落引起故障。
- 10.绝对不能将头部放入产品内。
- 11.请勿在棉被内使用。
- 12.禁止自行拆卸、修理及改造产品。

清洁收藏：

本体外侧平常用材质柔软的干布擦拭。

外观感到非常脏时，在擦布上加入中性清洁剂拧干后擦拭脏垢表面，然后再用拧干后的清洁布擦拭，最后再自然凉干。

清洗时，请勿用酒精、稀释剂及挥发性液体清洗。

脚踏板：

请用拧干的布擦拭，并且自然晾干。

脚踏板若不清洁收藏，恐怕产生发霉等现象。

保养：

使用后请用袋子将本体盖住，避免灰尘等进入，并放置于湿气较少的地方，经过特殊处理，使用完后，用毛巾将足浴桶内擦干既可收藏。

安全性能：

采用高科技远红外线和生物频谱技术相结合，采用没有污染和副作用的环保材料制作。

四、包装：纸箱包装

五、产品维修

本产品保修一年，终身维修（人为损失除外）。

用户在使用过程中如需维修、服务，请与当地代理商联系。