

瘫痪病人护理床专业生产制造厂家

产品名称	瘫痪病人护理床专业生产制造厂家
公司名称	衡水宇晨医疗器械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:宇晨 规格:1900*900*500 产地:衡水
公司地址	河北省衡水滨湖新区彭杜乡北田村
联系电话	15369860704

产品详情

瘫痪病人护理床厂家,瘫痪病人护理床生产厂家,瘫痪病人护理床专业生产厂家瘫痪病人护理床适用范围:用于病人的康复护理使用,主要应用于医院、养老院和家庭。瘫痪病人护理床使用方法:1、体位调整:握紧头位控制把手,使气弹簧解除自锁,其活塞杆伸出,同时驱动头位床面缓缓升起,升到需要的角度时,松开手柄,床面即锁定在该位置;同样握紧手柄并向下施力则下降;大腿位床面的升降由大腿位摇柄控制;足位床面的升降由足位控制手柄控制,当握紧时,使拨销脱离定位孔,靠自重下降,到所需角度时,松开手柄则足位床面即锁定在该位置;协调运用控制把手和以及摇柄,可使病人获得从平卧到半卧、曲腿、平坐、端坐各种体位姿势。另外,病人在平卧状态下,若想侧卧,首先将一侧小床头拉出,翻下该侧护栏,一只手按下床面外侧的控制按钮,使侧位气弹簧解除自锁,其活塞杆伸出,同时驱动侧位床面缓缓升起,升到需要角度时,松开控制按钮床面即锁定在该位置,从而完成侧卧姿势。注:反向使用相同操作。

2、解便装置的使用:顺时针转动解便摇柄,便孔盖自动打开,同时便器载体沿横向自动送到病人臀下,病人可进行大小便或清洗下部,逆时针转动解便手柄,则便孔盖关闭与床面保持齐平,同时便盆自动送到操作者一侧,以便护理人员拿走清洗,清洗的便盆放回便盆载体,以备下次使用。

3、护理床的护栏的使用横握侧护栏顶边,垂直向上提约20毫米,向下翻转180度,即可放下护栏,病人上床后,将护栏向上提翻转180度后,垂直按下即可完成侧护栏升起。注:足位护栏使用方法相同。

4、生活台面的使用:将生活台背面塑料件的开口对准侧护栏的上侧,压下即可。一手压住护栏,另一手向上抬生活台面,即可卸下。

5、输液吊架的使用:无论床面处于任何状态,均可使用输液架,使用输液架时,首先将两段输液架拧成一根,再将输液架下面弯钩,对准上面横管,同时将上面的钩头对准侧护栏上面管的圆孔压下即能使用,向上提输液吊架即拆下。

6、制动闸的使用:用脚或手下压动闸时为制动,上抬为松开。

7、安全带的使用:当患者使用本床或需改变体位状态时，必须系好安全带，(安全带的松紧度根据个体的不同适当调节)，防止发生危险。

8、洗脚装置的操作:当足位床面水平时，调整大腿位摇柄，抬起大腿位床面，以防患者滑落;握紧足位控制手柄，把足位床面放到适当位置，翻下足位活动板，再摇动大腿位摇柄使足位活动板保持水平，放上水盆，即可洗脚。当洗完脚，取下水盆，把足位活动板，复位到原处。握紧足位控制手柄，向上提起足位床面到水平位置

瘫痪病人护理床护理床安装：1、脚轮，有两个带制动闸，把带有制动闸的两脚轮对角安装在床架床腿上的螺孔内;再把剩余的两个脚轮安装在其余两个床腿的螺孔内。

2、背位床面的安装:将背位床面与床架用背框销轴连接好，再把销轴用开口销锁好。

3、床头的安装:分别将床头对准背位床面两侧的孔位插入，拧紧两侧的紧固螺丝。

4、背位气弹簧的安装:向上推起背位床面至90度角，将背位气弹簧带有螺丝的一端拧入背位床面底部的气弹簧支撑座再把气弹簧下支撑座与床体大架的U字用销轴连接在一起，再用开口销把销轴锁好。

5、侧位气弹簧的安装:侧位气弹簧的安装与背位气弹簧的安装相同，只需轻抬侧位床面，将侧位气弹簧下撑座与床体按下U字用销轴连接起来，再用开口销把销轴锁好。然后按下侧位控制按钮将侧位床面置水平位置。

6、足位床面的安装:首先将足位床面翻过来，把孔管与孔管上支撑座用销轴连接在一起，用开口销锁好。再回旋孔管滑套支架两侧的螺丝，把孔管滑套两侧孔对准支架上的螺丝，用扳手拧紧螺丝。拿起足位床面与大腿位床面的连接孔对接用足框销轴穿好，再用开口销锁好即可。

7、足位护栏的安装:把两个足位护栏分别紧固到足位床面的安装孔内，穿上螺丝拧紧即可。

8、安全带的安装:取出安全带，绕过头位床面的软垫，穿过头位床面背后的两个限位孔即可。

瘫痪病人护理床注意事项：1、当需要左右侧翻功能时，床面必须为水平位置，同样，背位床面升降时，侧位床面必须降置水平位置。

2、采取坐姿解便，轮椅功能或洗脚时，都需升起背位床面，请注意在此之前先将大腿位床面升至适当高度，以防病人下滑。

3、不要在崎岖不平的路面上行进，也不要再在有斜坡的路上停放。

4、每年对丝杠螺母，销轴部位加少许润滑油。

5、请经常检查各活动销轴，螺丝，护栏对丝，防止松动脱落。

6、严禁推拉气弹簧。

7、丝杠等传动部件，请不要用力操作，出现故障请检修后使用。

8、足位床面升降时，请先向上轻提足位床面，再提起控制把手，防止折断把手。

9、严禁在床的两头坐人。

10、请使用安全带，禁止儿童操作。一般来说护理床的保修期为一年(气弹簧、脚轮保修半年)

