

艾暖蒸汽眼罩热敷眼罩缓解眼疲劳眼罩加热式护眼罩热敷明目眼罩

产品名称	艾暖蒸汽眼罩热敷眼罩缓解眼疲劳眼罩加热式护眼罩热敷明目眼罩
公司名称	青岛沃普艾斯日用品有限公司
价格	.00/盒
规格参数	品牌:Inuan/艾暖 规格:3片/盒 产地:山东省
公司地址	青岛市市南区香港中路18号福泰广场A1002户
联系电话	18863996556 18863996556

产品详情

产品说明：

规格：3片/盒

有效期：3年贮存方法：请勿阳光直射，将产品储存至阴凉处

产品特点：

- 1、当眼罩开始出现蒸汽时渐渐地你会感觉到有舒适的蒸汽围绕在你的眼周，虽然眼睛看不到蒸汽，但能够明显感觉有湿润的感觉；温柔的蒸汽如发自内心的暖流，使眼睛和情绪从紧张疲惫得以解放。
- 2、产品主体为薄片型（不同于传统暖贴的缩小型）安全性、蒸汽量和温度均为眼贴的理想选择。
- 3、采用柔软弹性的材料制作，完全贴合眼部曲线，确保安全舒适。
- 4、如今电脑、电视和手机使用频繁、加快了眼睛疲劳的老化；如同给身体洗澡按摩进行放松保健一样，眼睛也需要蒸汽眼罩为之放松保健。

使用说明:

- 1、撕开包装，取出眼罩，将其展开，挂上双耳即可；
- 2、取出后眼罩即可发热，随之产生蒸汽，打开包装后请尽快使用；

3、使用时闭上眼睛，放松精神，让眼部充分享受15分钟左右的蒸汽SPA，直至无热感，即可取下眼罩。

注意事项:

使用前注意事项：眼睛有疾病、炎症或周围有划痕、肿胀、湿疹等异常情况的，请勿使用。眼睛对热量过敏、正在接受治疗的，请咨询医生后使用。请贮存于婴幼儿不易接触的地方，避免阳光直射。

使用后注意事项：

- 1、请用手工打开包装，用剪刀可能会切坏眼罩；若眼罩已经破损，请不要使用。
- 2、禁止在微波炉里加热
- 3、如果眼罩内含物附在皮肤上，用清水冲洗或用湿布擦拭；如果有内含物进去眼睛里，请立即充分清洗；如果仍然有异常不适，请咨询眼科医生
- 4、眼罩只能使用一次，不能重复使用，使用后的眼罩可放入垃圾箱里，对环境无不良影响。