

低温等离子灭菌器 医用器械内窥镜快速消毒设备

产品名称	低温等离子灭菌器 医用器械内窥镜快速消毒设备
公司名称	河南爱慈达医疗器械销售有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:三强 型号:SQ-D 标准灭菌时间:45分钟
公司地址	河南省安阳市滑县新区漓江路与古城路交叉口50米路南
联系电话	15333721997

产品详情

低温等离子灭菌器 医用器械内窥镜快速消毒设备

灭菌工艺流程

(1) 真空阶段I：启动真空泵，灭菌室内压力设置时，进入真空保压/预等离子阶段，去湿、灭菌准备，在程序设置时间内压力一直维持设定范围内，高频射频源激发产生等离子体。

(2) 扩散阶段I：过氧化氢注入灭菌室后迅速扩散，灭菌室内压力上升至设定范围内并维持在这个水平直到扩散阶段I完成。

(3) 真空阶段II：扩散完后先换气，导入经无菌过滤器处理的空气，灭菌室压力恢复到大气压；然后开始抽真空，至压力小于设定值。

(4) 等离子阶段I：灭菌室内压力维持在设定值，高频射电源激发产生等离子体。

(5) 扩散阶段 : 重复第2阶段

(6) 真空阶段 : 重复第3阶段

(7) 等离子阶段 : 重复第4阶段

(8) 回空阶段: 空气经无菌过滤器进入灭菌室后, 压力恢复到大气压, 程序结束。

不适用于下列物品

A. 吸湿材料 (木质器械、纤维素、棉织物、纱布)

B. 一次性器械 (一次性防水织物、一次性手术服)

C. 液体、膏剂、油剂和粉剂

D. 不完全干燥物品

E. 一端封闭的内腔

F. 植入物

G. 不能承受真空压力的器械

H. 标示为仅使用压力蒸汽灭菌或环氧乙烷灭菌的器械

I. 器械具有复杂的内部部件, 难以清洁, 例如密封轴抽

J. 带有尼龙拼和表面的物品

K. 老化，表面有破损，材质不确定的软式内镜

您好！欢迎观临厂家店铺，价格详情和规格参数请咨询服务热线了解，谢谢