

日本NAKA卫生间支撑型扶手安装的注意事项

产品名称	日本NAKA卫生间支撑型扶手安装的注意事项
公司名称	广州艾若多自动化控制设备有限公司
价格	1.00/个
规格参数	NAKA:1 SLC-2:1 日本:1
公司地址	广州市番禺区桥兴大道989号中创汇U+创意园2栋2321-2322室
联系电话	86-02039239047 13560154185

产品详情

日本NAKA卫生间支撑型扶手安装的注意事项：

日本NAKA卫生间支撑型扶手是卫生间含抗菌剂的辅助器具，在安装上注意的要点如下：

1. 一定要安装在有强度的墙壁或建筑结构体上：直接安装在土墙.石膏板等没有强度的墙壁的话，会导致扶手脱落或弄坏墙壁，让使用者有跌倒、受伤的可能。
2. 设置于卫生间等用水的地方时，一定要在安装孔的周围涂上封闭剂：如不涂上封闭剂，水浸入到墙面会导致扶手脱落，或弄坏墙壁，让使用者跌倒.受伤的可能。
3. 一定要使用指定的固定金属零件：如不使用指定的固定金属零件，会导致扶手脱落，或弄坏墙壁，让使用者跌倒.受伤的可能。
4. 确认基础是否有充分的厚度和加强。
5. 安装完毕后确认扶手是否有晃动，如扶手有晃动，会导致扶手脱落，或弄坏墙壁，让使用者跌倒.受伤的可能。
6. 除了修理技术人员以外的人，绝对不可以分解.修理.改造。

日本进口NAKA扶手安装次序：

1. 首先固定安装位置以及固定零部件的安装：使用14mm的钻孔机钻下孔，固定挂钩式螺母和无头螺栓。无头螺栓从墙面的露出长度为14-16mm
2. 在墙面的安装：在壁面设定好螺栓后，固定好底座（可动部组装品），平垫圈、弹簧垫圈、六角

螺母，确认无晃动。

3. 外套以及扶手的安装：A在固定于墙面的底座（可动部组装配件）上套上底座外套（直到发出咔嚓声）千万注意：为了防止搞恶作剧，外套一旦套上去之后就很难再取下来，请一定要在确认底座固定好后再安装外套。B把衬垫片安装于回转轴的前端，安装时注意其方向，如安装方向有误，扶手无法变成可动。C螺丝套的槽口部朝上，把扶手插入底座（可动部组装机）D用附属的十字扁圆小螺丝头M4*8,固定回转轴和扶手，请按上下顺序来固定螺丝。注意固定螺丝时，不要混入油或异物等，为防止扭断螺丝，请不要使用电动工具，用手固定。E把螺丝盖滑向底座（直到发出咔嚓声）。

如有不明白地方，请电话联系广州艾若多公司吴经理：13560154185可在线指导安装。