

低温环氧乙烷灭菌器 医用器械EO消毒柜 大/小型

产品名称	低温环氧乙烷灭菌器 医用器械EO消毒柜 大/小型
公司名称	河南爱慈达医疗器械销售有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:三强 型号:SQ-H 灭菌温度:50 ± 5
公司地址	河南省安阳市滑县新区漓江路与古城路交叉口50米路南
联系电话	15333721997

产品详情

低温环氧乙烷灭菌器 医用器械EO消毒柜 大/小型

环氧乙烷灭菌器安装说明

依靠环氧乙烷气体在一定的温度、湿度压力下达达到彻底的灭菌，环氧乙烷气体直接破坏微生物蛋白质，阻止其新陈代谢，可以杀灭Z顽固的各种杆菌！

主要用于各类腔镜、棉纺类、硅胶、橡胶、及导管导线及各种医用耗材，不会对器械有任何的腐蚀和损坏，

具有自动处理残气的功能！内置有残气处理器、把残气转换成液态的乙二醇通过下水道排出、对环境没有污染、对人体也没有伤害、符合G家标准环保要求、

具体安装条件：安装有独立房间 要有通风（比如窗户）、水源（普通自来水）、电源（DC：220V）、下水道

环氧乙烷灭菌技术已经成为医院怕热怕湿医疗器械灭菌的主要选择的方法之一,而小型环氧乙烷灭菌器则是实现医院选择该灭菌方法的主要类型装置。目前,市场上出现的台式环氧乙烷灭菌器体积较小,使用方便,很适合少量灭菌物品的场所,已为不少二三级医院所配备。

为了解此类环氧乙烷灭菌器装置的实际灭菌效果情况,我们选择一种小型台式环氧乙烷灭菌器,就其实际灭菌效果以及灭菌过程中环境中环氧乙烷的浓度情况进行了试验观察。现将结果报告如下。试验材料试验用环氧乙烷灭菌器为EO-2型环氧乙烷灭菌器,容积300L,分4层放入载物架。

灭菌器工作方式采用非压力型,灭菌过程不需要真空处理。灭菌用环氧乙烷为液体安瓿制剂,每支安瓿内装环氧乙烷20g。生物指示剂为枯草杆菌黑色变种芽孢制作的自含式生物指示剂管,模拟现场灭菌试验用该芽孢悬液。

您好！欢迎观临厂家店铺，价格详情和规格参数请咨询服务热线了解，谢谢