

铝合金输液轨道A东海铝合金输液轨道A铝合金输液轨道厂家

产品名称	铝合金输液轨道A东海铝合金输液轨道A铝合金输液轨道厂家
公司名称	衡水嘉铭塑料制品有限公司
价格	6.50/米
规格参数	品牌:嘉铭 型号:30*20*1.2 产地:河北
公司地址	河北省衡水市景县高新区
联系电话	13785849878

产品详情

铝合金输液轨道A东海铝合金输液轨道A铝合金输液轨道厂家

轨道：铝合金材质，白色亚光色泽，有I型、U型、O型、L型、

规格：U、O、L型 32mm*28mm*1.2mm/1.3mm I型 32mm*28mm*1.0mm (长度按照客户要求订做)

适用范围

安装于医院、养老院、福利院等的医疗设施。

铝合金输液轨道产品特点1、天轨输液轨道有O型、L型、U型、直型，也可特制各种异型轨道。

2、在运输、安装过程中不变形，使用时滑动顺畅，承重安全。

3、我们的安装采用塑料胀塞加木螺丝。

4、市场上的塑料胀塞太杂，安全性没有保障。我们自己开模具，制作加厚、材质优良、韧性好的塑料胀塞。100%保证了使用安全。

滑车可在轨道上任意移动，当吊杆承重时，滑车会固定吊杆的位置；

滑车结构紧凑合理，减小拐弯半径，滑动灵活、顺畅；

滑车轮采用独特加工工艺，应用高科技纳米材料，国内首次真正实现静音、无尘、耐磨；

滑车形状会随着轨道弧形自动调整，保证在环型轨道上也可灵活滑动。

铝合金输液轨道安装方法

- 1、首先确定输液天轨的安装位置，一般安装在病床中央的天花板上。需注意避开灯风扇，手术室安装时应注意避开吊塔和无影灯。
- 2、测量所购天轨输液架的轨道安装孔孔距，用 $\varnothing 8$ 冲击钻头在天花板上钻出深度大于50毫米的孔，打入 $\varnothing 8$ 塑料膨胀（注意塑料膨胀打入后应与天花板平齐）。
- 3、将滑车装入轨道内，用M4 \times 10自攻螺钉将塑料封头安装轨道两端（O型轨无堵头，其接头处应平整对齐，保证滑车能在轨道内自由滑动）。然后用M4 \times 30平头自攻螺钉将轨道安装在天花板上。
- 4、安装完毕后，将吊杆挂在吊车挂钩上，检查其运转及其他性能。

铝合金输液轨道U型轨道，标准规格为1.8m*0.8m，铝合金材质

直型轨道，规格根据现场实际而定，铝合金材质

椭圆型轨道，标准规格为1.8m*0.8m，铝合金材质 椭圆型轨道采用独特工艺一次加工成型，只有一个结合口，并有强化PVC专用连接件，使整套轨道浑然一体，极大增加了轨道的刚度。在运输、安装过程中不变形，使用时滑动顺畅，承重安全。

衡水嘉铭塑料制品有限公司是专业从事医用防撞扶手、无障碍扶手、防撞护角、防撞护墙板、天轨输液架、医用轨道。

病床医用隔帘等材料设计、研发、制造、销售与安装的实力型企业。

衡水嘉铭塑料制品有限公司拥有国际上著名品牌的先进专业设备和一支经验丰富的专业技术人才队伍，

是一家专业从事防撞扶手、无障碍扶手等产品设计、开发、生产的实力型企业，能为市场（客户）不断提供高品质的设计产品。

目前公司产品分为：残疾人无障碍卫浴扶手、医院抗撞扶手、PVC防撞墙护角、天轨输液架、医用轨道等几大类。

目前该系列的产品已广泛应用于各地的医院、宾馆、商场、酒店、老年公寓、学校、幼儿园、娱乐场所等；

在使用的过程中，更加可以体现出我们产品的科技化与人性化。公司本着以客户利益至上为原则和务实积极的态度为客...

