

老人护理病床厂A老人护理病床厂家A老人护理床厂家价格

产品名称	老人护理病床厂A老人护理病床厂家A老人护理床厂家价格
公司名称	衡水宇晨医疗器械有限公司
价格	498.00/张
规格参数	品牌:宇晨 产地:衡水 包装:纸箱
公司地址	河北省衡水滨湖新区彭杜乡北田村
联系电话	15369860704

产品详情

老人护理病床厂A老人护理病床厂家A老人护理床厂家价格

护理床用途:用于病人的康复护理使用，主要应用于医院、养老院和家庭。一般是针对于那些行动不便，长期卧床的病人，每天都需要在护理人员的帮助下下床进行饮食、康复训练。单纯以人力来帮助患者上下床，不仅对护理人员来说是很大的负担，更可能会因用力不当对患者造成磕碰、拉伤等人为损伤，所以如果条件允许建议选购一款专门针对瘫痪患者的护理床，这种护理床可以更好的在生活中帮助护理人员护理患者，如:移动餐桌、餐桌板及坐起功能等，可以良好的帮助护理人员照看患者，同时还大大减轻了护理人员的负担。

标准的手动护理床一定要用好的各构成条件如下：

一、手动护理床按功能基本技术规格可分为：

- 1、手动三摇床的规格常用规格定为：2150*1000*520/720mm。
- 2、手动双摇床的规格常用规格定为：2150*1000*520mm。
- 3、手动普通病床的规格常用规定定为：2020*900*500mm。

二、手动护理床主要技术参数指标：

- 1、三摇床、双摇床及普通病床的外形要整齐，表面不得有锋棱，焊接应牢固、焊缝应光滑、均匀；
- 2、床架弯圆处的管子外径应圆滑喷塑层应光滑平整、色泽均匀；

- 3、床身与床架装配后应固定牢固，不得松动。手柄转动灵活，不用时可折回；
- 4、三摇床背位床面可调整范围： $80^{\circ} \pm 5^{\circ}$ ，大腿位调节范围： $40^{\circ} \pm 5^{\circ}$ 及整体升降范围：520~720mm；双摇床背位床面可调整范围： $80^{\circ} \pm 5^{\circ}$ ，大腿位调节范围： $40^{\circ} \pm 5^{\circ}$ ；普通病床即固定的高度为500mm左右。

护理床安装步骤:

- 1、脚轮，有两个带制动闸，把带有制动闸的两脚轮对角安装在床架床腿上的螺孔内；再把剩余的两个脚轮安装在其余两个床腿的螺孔内。
- 2、背位床面的安装：将背位床面与床架用背框销轴连接好，再把销轴用开口销锁好。
- 3、床头的安装：分别将床头对准背位床面两侧的孔位插入，拧紧两侧的紧固螺丝。
- 4、背位气弹簧的安装：向上推起背位床面至90度角，将背位气弹簧带有螺丝的一端拧入背位床面底部的气弹簧支撑座再把气弹簧下支撑座与床体大架的U字用销轴连接在一起，再用开口销把销轴锁好。
- 5、侧位气弹簧的安装：侧位气弹簧的安装与背位气弹簧的安装相同，只需轻抬侧位床面，将侧位气弹簧下撑座与床体按下U字用销轴连接起来，再用开口销把销轴锁好。然后按下侧位控制按钮将侧位床面置水平位置。
- 6、足位床面的安装：首先将足位床面翻过来，把孔管与孔管上支撑座用销轴连接在一起，用开口销锁好。再回旋孔管滑套支架两侧的螺丝，把孔管滑套两侧孔对准支架上的螺丝，用扳手拧紧螺丝。拿起足位床面与大腿位床面的连接孔对接用足框销轴穿好，再用开口销锁好即可。
- 7、足位护栏的安装：把两个足位护栏分别紧固到足位床面的安装孔内，穿上螺丝拧紧即可。
- 8、安全带的安装：取出安全带，绕过头位床面的软垫，穿过头位床面背后的两个限位孔即可。