

病人点滴医用轨道A金寨病人点滴医用轨道A病人点滴医用轨道厂家

产品名称	病人点滴医用轨道A金寨病人点滴医用轨道A病人点滴医用轨道厂家
公司名称	衡水嘉铭塑料制品有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:嘉铭 型号:30*20*1.2 产地:河北
公司地址	河北省衡水市景县高新区
联系电话	13785849878

产品详情

病人点滴医用轨道A金寨病人点滴医用轨道A病人点滴医用轨道厂家

输液轨道：

材质：铝合金（输液轨道截面规格型号齐全）

轨道整体规格：1.8*0.8*1.8

1、天轨输液轨道有直轨、U型轨、O型轨，也可特制各种异型轨道。

2、O型轨道采用独特工艺一次加工成型，只有一个结合口，并有强化PVC专用连接件，使整套轨道浑然一体，极大增加了轨道的刚度。在运输、安装过程中不变形，使用时滑动顺畅，承重安

病人点滴医用轨道输液架U轨介绍轨道：铝合金材质，白色亚光色泽，有I型、U型、O型、L型、

截面：30mm*20mm*1.2mm/

U型规格：1800mm*800mm(长度按照客户要求订做)

I型规格：1500mm/1800mm/2000mm/2600mm (长度按照客户要求订做)适用范围：安装于医院、养老院、福利院等的医疗设施。病人点滴医用轨道产品特点：1、天轨输液轨道有O型、L型、U型、直型，也可特制各种异型轨道。2、在运输、安装过程中不变形，使用时滑动顺畅，承重安全。3、我们的安装采用塑料胀塞加木螺丝。4、市场上的塑料胀塞太杂，安全性没有保障。我们自己开模具，制作加厚、材质优良、韧性好的塑料胀塞。100%保证了使用安全。

病人点滴医用轨道滑车：滑车可在轨道上任意移动，当吊杆承重时，滑车会固定吊杆的位置；滑车结构紧凑合理，减小拐弯半径，滑动灵活、顺畅；滑车轮采用独特加工工艺，应用高科技纳米材料，国内首次真正实现静音、无尘、耐磨；滑车形状会随着轨道弧形自动调整，保证在环型轨道上也可灵活滑动。

病人点滴医用轨道安装方法：1、首先确定输液天轨的安装位置，一般安装在病床中央的天花板上。需注意避开灯风扇，手术室安装时应注意避开吊塔和无影灯。2、测量所购天轨输液架的轨道安装孔孔距，用 $\phi 8$ 冲击钻头在天花板上钻出深度大于50毫米的孔，打入 $\phi 8$ 塑料膨胀（注意塑料膨胀打入后应与天花板平齐）。3、将滑车装入轨道内，用M4×10自攻螺钉将塑料封头安装轨道两端（O型轨无堵头，其接头处应平整对齐，保证滑车能在轨道内自由滑动）。然后用M4×30平头自攻螺钉将轨道安装在天花板上。4、安装完毕后，将吊杆挂在吊车挂钩上，检查其运转及其他性能。

5、由于天花种类繁多，不同天花类型，轨道的安装方法不一样，详情请致电我司专业工程师，我们将为您解答。