

# 孕妇胎心监护带 医用胎监带 胎心监护胎监带

产品名称	孕妇胎心监护带 医用胎监带 胎心监护胎监带
公司名称	咸阳精博商贸有限公司
价格	1.00/包
规格参数	
公司地址	陕西省咸阳市渭城区永绥街中央领域1号楼2209号
联系电话	029-233334123 18700086010

## 产品详情

【产品名称】 压力绷带

【产品描述】

间接作用于创面，捆绑到\*人某个部位，对其施加一定压力，以起到\*\*或辅助性\*\*目的的用品。

【预期用途】

用于加压包扎，达到消除腔隙、临时止血（非动脉止血）、保护手术切口、预防疝气等辅助性\*\*效果。

【产品结构及性能】 I骨盆牵引型：由易拉带、尼龙搭扣二部分组成的压力绷带。易拉带由优良的伸缩性材料整根裁切而成，中间缝合三根支撑小带，两段配有尼龙搭扣可以根据骨盘大小自由收紧维系。主要性能是收紧臀围，矫正变形骨盆，对产妇产后骨盆疾患有助作用。 II胎监绑扎型：由松紧带制成，能根据需要任意调整绑带的松紧程度。用于固定胎心检测仪器使用，避免交叉感染。

【使用方法】 双脚站直，将医用牵引带的圈绒面朝外，并将带体凹槽正中部位对准耻骨，双手

拉紧带体两端，由前至后环绕带体，在臀部将带体交叉后拉回至前面把两端扣上

即可。本品在产后至六周内使用为\*\*时期。 II型：能根据需要任意调整绑带的松紧程度即可。

【产品禁忌症】 有出血倾向、恶性肿瘤、高热、\*\*损伤患者慎用。

【注意事项】 1、穿脱时，请注意勿将粘扣粘拉住衣服；

2、洗涤时请单独手洗带体；

3、请勿维系在大腿根部固定处；

4、在使用时感觉异常，请立即停止使用并向医生咨询。