

全自动血液融浆机CYRJ-8D操作指导

产品名称	全自动血液融浆机CYRJ-8D操作指导
公司名称	杭州川一实验仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:川一仪器 型号:CYRJ-8D 产地:杭州
公司地址	浙江省杭州市余杭区南苑街道临东路172-2号409 A室（注册地址）
联系电话	18158509323

产品详情

全自动血液融浆机CYRJ-8D操作指导

主要特征：

- 1、全自动恒温解冻仪采用柔性、导热性能良好的材料，将血浆袋和水隔离开，按启动键后，热水自动注入水袋内，从而避免了血浆袋标签脱落、血浆袋破裂、水质污染等事故的发生。
- 2.智能型微电脑进口控制器，数字显示温度，时间。
- 3.加热装置，由自动测温器、温度传感器、传感电缆和高效加热组成。
- 4.控制系统:微电脑全程控制，多重视听报警系统，待机、融化等工作模式。
- 5.内胆采用防菌镜面不锈钢，大敞口水浴便于清洁，排水管连接简便，排水迅速。
- 6.水循环系统进行解冻，迅速、充分、无瞬间温差，温度均衡，不会破坏血浆的有效成分
- 7.节能减排、节约水资源；隔水膜袋使用医用绿色新型材料制成，无毒,无味，无毒副作用、使用寿命长。 ，保护环境减少污染。
- 8.断电记忆保护功能，防止断电数据丢失,超温报警自动断电功能，低水位自动报警并自动停止加热
- 9.内胆均采用聚氨酯发泡技术，保证里面温度的均匀性与波动度
- 10.温度校准:用标准温度计进行校准。

技术参数：

型号	样品数(个)	融化温度	解冻时间	控温精度	电源	功率	循环泵流量
CYRJ-4D	4	30 —45	10-20min	± 0.5	220V/50HZ	2.0KW以上	15L
CYRJ-6D	6						
CYRJ-8D	8						
CYRJ-10D	10						
CYRJ-12D	12						

使用须知：

- 1.放入“解冻制品”时一定要在停机状态时进行，并注意观察红色“压水棒”是否在隔水膜袋底部，一定要轻轻放入解冻制品。
- 2.避免“解冻制品”锋利尖锐部位扎破，划伤隔水膜袋。在放入解冻制品时请您注意观察解冻制品边缘，如有“尖锐”“突出”部位，请您适当处理后再将制品轻轻放入隔水膜袋，避免“扎伤，划伤”隔水袋。
- 3.万一隔水膜袋被扎破，你可以取下隔水膜袋，将隔水膜袋灌满水找出渗漏部位，用笔做好标识，然后将膜袋内的水放干净，把渗漏部位适当处理干净，晾干，沾上医用胶布（或胶带）压实，粘结牢固，这样处理过的隔水膜袋不影响血浆解冻，而且会更好的延长“隔水膜袋”的使用寿命。（有可能划伤的是同一个部位）

【维护保养方法】

- 1.在仪器运转时你掀开隔水膜袋观察水污染情况，根据水的质量情况确定您是否需要换水，如使用纯净水会延迟您换水的时间。
- 2.水箱内的水进行消毒时从加水口处放入为0.5/100的氯片即可。
- 3.水箱清洗时，在设备右侧有放水口，您将水箱内的水全部放掉，然后关死放水阀门，从加水口再加入清水并加入2片消毒片开动设备运行10分钟，沉淀20分钟再把水放掉，以上步骤重复2次即可。

更换隔水膜袋：

用“大拇指向上抠一下袋口底部、外口外圈会有缝隙、顺着往上提隔水袋就会拆下来。安装隔水袋您只要先放入一头，对好下面的定位槽顺序按下去，然后顺势下压隔水袋边沿，直至隔水袋与袋口板没有缝隙，更换隔水袋工作结束。

注意事项

- 1、将白色压水棒放入隔水膜袋中，请勿直接扔进去，这样很容易划破解冻袋。
- 2、打开仪器上面小盖、加入干净的自来水，最好是纯净水。（仪器可长期不用换水。使用一段时间后，在仪器工作时，提起隔水膜袋观察水的清澈程度确定是否需要换水）

- 3、放入样品时候需同注意事项1一样.
- 4、加水过多时侧面会有水溢出，这样不会影响仪器使用，您可在侧面放水阀门放出少许即可。
- 5、等待15-25分钟液晶屏实际温度显示37度，即可将样品放入隔水膜袋中点击“开/关”按钮-----OK。
- 6、如需要改变设定温度、时间请参照操作手册。