

## 【雷米高官方授权】BIT犬细小病毒测试纸CPV/细小试纸/份

产品名称	【雷米高官方授权】BIT犬细小病毒测试纸CPV/细小试纸/份
公司名称	上海凡诺奇日用品有限公司
价格	10.00/支
规格参数	产品类别:病毒检测 品牌:雷米高 产品形态:固态
公司地址	上海市金山区吕巷镇干巷荣昌路318号5幢2014室
联系电话	86-21-51082357 13901820783

## 产品详情

产品类别	病毒检测	品牌	雷米高
产品形态	固态	功能	其他
适用宠物	通用	使用方式	外用

【品名】雷米高原装bit cpv细小病毒试纸

【规格】一套（含测试板、缓冲剂、取样棉签）

【品牌】雷米高 bit cpv 原装进口

【细小病状】

细小病毒是犬的一种急性传染病。临床上多以出血性肠炎或非化脓性心肌炎为其主要特征。有时其感染率可高达100%，致死率为10—50%。解放军兽医大学(现易名为农牧大学)于1982年在长春地区首次分离出该病毒，从而证实了我国也有本病存在。犬、猫和貂的细小病毒具有一定的抗原相关性。病犬是本病的主要传染源，病犬的粪、尿、呕吐物和唾液中含毒量最高。病犬不断向外排毒而感染其他健康犬。康复犬粪便中长期带毒。因此，犬群中一旦发病，极难彻底清除。除犬外，狼、狐、浣熊也可自然感染。本病主要通过直接或间接接触而感染。

犬细小病毒对外界因素抵抗力较强，于60~c环境可存活1小时，80~c可耐30分钟，于偏酸(氢离子浓度1000微mol/l，即ph3)环境和偏碱(氢离子浓度1nmol/l，即ph9)环境中病毒仍有感染性。该病毒对0.5%的福尔马林或0.5%的氧乙酸较敏感，对氯仿和乙醚不敏感。如果将含毒粪便和肠管冷藏于低温环境，其感染性可长期保持。

肠炎型：潜伏期为7~14天，一般先呕吐后腹泻，粪便呈黄色或灰黄色，内含多量粘液和伪膜。病后2~3天，粪便呈番茄汁样，混有血丝，并有特殊腥味。此时病犬精神沉郁，食欲废绝，体温升至40℃以上，渴欲增加。有的病犬到后期体温低于常温，可视粘膜苍白，尾部及后腹部常被粪便污染，严重者肛门松弛并开张。

心肌炎型：幼犬呼吸困难，心悸亢进，可视粘膜苍白，体质衰竭，常突然死亡。通常可根据上述流行特点、临床症状作出初步诊断。在临床上应注意观察病犬是否有呕吐和腹泻。如果要进一步确诊，应早期采取病犬腹泻物，用0.5%的猪红细胞悬液，在4℃或25℃按比例混合感作，观察其对红细胞的凝集作用。必要时也可将粪便样品送检验单位做电镜检查，进行确诊。

### 【检测方法】

1.检测物的采集及保管：用棉签收集犬类眼部的分泌物，鼻液，唾液、粪便和尿液（所有取样中以粪便最佳）。

2.检测方法：测试板置于潮湿环境内，有可能导致抗体的点滴浓度和稳定性下降，因此应在使用前开封和提取适量使用。利用取样棉签充分采集准备检测物后，放入装有缓冲剂的试管内适当进行溶解。打开滴下口盖，在反应板的检测物滴入口滴入3-4滴。检测物滴下后，等到检测物充分扩散，然后在5-10分钟内进行判断。

3.判断结果：根据检测线与对照线的结果判断阴性和阳性。

阴性：只有对照线（c）呈红色或者紫色线时。此情况表示没有感染细小病毒。

阳性：只有检测线（t）与对照线（c）均呈红色或紫色时。此情况表示已经感染细小病毒。

无效：无紫红色线出现。表明此次化验失败，请重新再试。

使用注意事项：检测工具在开封后应立即使用。

储藏方法：室温保存

很多新手朋友都有这样的经历，小狗买回家里，不超过一个星期，有的甚至过不了两天就生病并导致感染传染病及并发症，大多的结果都是可想而知的。其实很多市场上出售的狗狗都携带及潜伏有致命的传染病菌或本身已感染疾病，包括犬瘟细小病毒肺炎等等，被感染狗狗的体内病毒可潜伏一至两星期，不为人所觉查，一旦发病，就很难治愈。未被感染携带病毒的狗狗由于突然更换环境，加之新主人经验的缺乏，就会出现抵抗力显著下降，从而导致感染，后果也同样是不堪设想。

带上相关测试试纸，自己就可以检测自己打算要购买的gg是否健康。如果检测有感染一定不能购买，没有感染，就可以把自己喜欢的gg带回家啦，不过也不能掉以轻心，要多注意加强营养，多点关心爱护，妥善过渡，就可以说是万无一失啦。

韩国进口细小检测试纸操作简单，检测精准，是目前中外兽医行业广为流行的一种检测方式！临床证实：准确度高达98%以上！亲自鉴定，避免被市面上的黑心狗贩子和黑医术医生蒙骗！