

爱超保健品安全套（避孕套）OYE纹色螺纹12只装

产品名称	爱超保健品安全套（避孕套）OYE纹色螺纹12只装
公司名称	桂林爱超健康产业有限公司
价格	.00/个
规格参数	类别:避孕用品（安全套等） 品牌:爱超
公司地址	桂林市秀峰区中山中路43号5-9
联系电话	2563088

产品详情

类别	避孕用品（安全套等）	规格	12只装·非光面型（螺纹型）W52±2mm
品牌	爱超	功能及用途	适用于避孕和有助于预防艾滋病和性病的传播。
材质	天然胶乳		

【产品标准】：gb7544-2004/iso4074：2002gb7544-2004天然胶乳橡胶避孕套-技术要求和试验方法。【生产许可证】：桂食药监械生产许20090001号【医械注册证】：桂林食药监械（准）字2009第2660055号【适用范围】：适用于避孕和有助于预防艾滋病和性病的传播。【禁忌症】：对天然胶乳橡胶过敏者慎用。【贮存方法】：本品应存放在阴凉干燥处，不受阳光直射的地方。

【性能结构及组成】：本产品采用天然胶乳加工而成，顶部有贮精囊，开口部有卷边，产品有高弹性和良好的抗张性。每只注硅油或水溶性润滑剂后，用铝塑膜包装而成。【注意事项】：1、如需额外添加润滑剂，请用水溶性润滑剂。勿使用石油基润滑剂，如凡士林、婴儿油、浴液、按摩油、黄油、人造黄油等，因为它们会破坏避孕套的完整性。2、有些使用者可能会对天然胶乳橡胶产生过敏反应，对天然胶乳橡胶产生过敏反应的使用者，请在使用前咨询医生。3、本品为润滑型，仅限一次性使用，不杀伤精子。【使用方法】：1、在勃起的阴茎与对方身体有任何接触前，应谨慎的撕开铝箔包装，轻轻将避孕套挤出，注意不要扯破避孕套，避免尖锐物品如指甲、珠宝饰物等对避孕套的损坏。2、检查避孕套末端卷曲部分是否在外面，如果不是，就说明戴反了。应挤出避孕套前端储精囊内的空气。3、接着戴上避孕套，并伸展至阴茎末端。如果在性交过程中，避孕套部分脱落，应立即将其套回原位。如果避孕套滑落掉出，请更换新的避孕套。4、射精后，应稳妥地从阴茎根部按住避孕套，并尽快撤出阴茎。避免阴茎与避孕套接触对方的身体。用纸巾包好使用过的避孕套，并放进垃圾桶内。*请勿扔进抽水马桶内冲走