

爱超保健品避孕套新品震动安全套ZD-002

产品名称	爱超保健品避孕套新品震动安全套ZD-002
公司名称	桂林爱超健康产业有限公司
价格	.00/个
规格参数	类别:避孕用品（安全套等） 规格:1只震动环+1只安全套/盒 品牌:爱超
公司地址	桂林市秀峰区中山中路43号5-9
联系电话	2563088

产品详情

类别	避孕用品（安全套等）	规格	1只震动环+1只安全套/盒
品牌	爱超	功能及用途	有效避孕和有助于预防艾滋病和性病传播。
材质	天然胶乳		

【生产许可证】桂食药监械生产许20090001号【医械注册号】桂食药监械（准）字2009第2660117号【产品标准号】yab/桂0024-2009《震动安全套》震动安全套是突破天然胶乳橡胶避孕套（以下简称避孕套）传统功能的新发明产品，借助震动的触感增加性爱过程的欢愉与快感，改善性功能。使用电动套环时请配戴附带的避孕套，才能够在激情浪漫中有效避孕和有助于预防艾滋病和性病传播。注意事项：1、本产品为一次性产品，请勿重复使用。2、电动套环的电力至少可维持30分钟。3、产品请置于阴凉干燥处保存并远离儿童可接触取得的范围。4、本产品请勿吞食。5、如果您或您的伴侣在使用过程中感到任何不适请立即停止使用。6、电动套环不是避孕器，如需避孕请搭配避孕套一起使用。7、电动套环的设计为体外使用，请勿尝试其他体内用法，例如置入女性阴道或口中。8、在紧急状况下如阴茎感觉紧迫不舒服，电动套环可从外圈特殊设计的安全破损点撕开拆除。

避孕套使用方法：1.小心打开包装袋，避免避孕套被指甲、珠宝饰物等尖锐物品损坏。2.请用拇指及食指轻轻挤出避孕套前端的储精囊内的空气，以存留射出的精液。3.将避孕套置于勃起的阴茎顶部，确保可卷曲部分向外，然后将卷摺部分慢慢卷套整个阴茎。必须在与对方性器官接触前，而阴茎已经勃起的情况下戴上。4.从包装内取出电动套环。5.请轻轻的将电动套环套在阴茎根部。6.请在使用过程中确定电动套环的凸点面向女性敏感部位。7.按下开关启动电动套环。当使用完毕后请按上开关停止震动。8.射精后，立即用手捏住避孕套根部，在阴茎完全抽离后，再褪下避孕套和电动套环。包起用过的避孕套和电动套环，请弃置垃圾桶内以保持卫生，不要丢进马桶内冲走。警告：如在使用完毕仍感到不适，请咨询医生。应咨询医生或者药剂师有关与避孕套接触的可适用的药物。