

# YX-12A氧气吸入器 鑫成

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | YX-12A氧气吸入器 鑫成               |
| 公司名称 | 启东市秦潭玻璃制品二厂                  |
| 价格   | 258.00/台                     |
| 规格参数 | 品牌:鑫成<br>测量范围:1-10L          |
| 公司地址 | 中国 江苏 启东市 江苏启东               |
| 联系电话 | 86 0513 83309085 15201704268 |

## 产品详情

|        |       |      |                            |
|--------|-------|------|----------------------------|
| 品牌     | 鑫成    | 型号   | YH-11B,YX-11B,YX-12,YX-12A |
| 测量范围   | 1-10L | 测量精度 | 5级                         |
| 产品适用范围 | 医疗，化工 |      |                            |

### yx-12a氧气吸入器

氧气吸入器的作用就是提供持续的恒定压力和流量的氧气，供病员使用。瓶插式氧气吸入器利用自带的减压装置，将氧气瓶内的高压（满瓶时15mpa压力）减至适合人体使用的低压（0.2~0.2mpa），然后经过水的湿润后输出给人体。而墙插式氧气吸入器由于输入压力即为0.2~0.4mpa，因此不需要再进行减压，直接输出给人体即可。湿化瓶内盛蒸馏水，主要作用是让氧气通过水体后变得湿润，确保病员呼叫时舒服无刺激。氧气吸入器的使用说明：1.加蒸馏水到湿化杯内，瓶体内水位不能高于上水线，但也不得低于下水线。禁止用生理盐水代替。2.吸入器插入供氧终端插座前应当先关闭流量调节开关，并调整氧气快速插头方向，然后将快速插头对准供氧终端插座孔插入，当听到“咔嚓”声响和看到供氧终端插座的锁紧套自动滑动时，说明快速插头与供氧终端插座已连接锁住。3.供氧前先将吸氧管插入输氧接头，再逆时针方向转动流量调节开关开启起源，使浮球缓慢上升（浮球中心所对准的刻度线为流量读数，单位为升/分），可根据需要进行调解供氧量。4.吸入器在供氧过程中，如吸入器瓶体内的水低于下水线时，应及时关闭流量调节开关，拧下湿化瓶体，按本项第一条的要求加上蒸馏水，在拧上吸入器瓶体，继续供氧。5.吸入器停止使用时，应关闭吸入器气源；如需取下时，应用手握住吸入器，进行后取下（不同供氧终端插座的解锁方法由工程安装单位负责解释），然后到掉瓶体内的水进行清洗消毒后，存放于无腐蚀和通风良好的室内）。

|   |               |           |  |
|---|---------------|-----------|--|
| 1 | 氧气吸入器(浮标式)10升 | yh.yx-11b |  |
| 2 | 氧气吸入器(墙式)10升  | yx-12     |  |
| 3 | 氧气吸入器(墙式)插入式  | yx-12a    |  |

墙插式氧气吸入器的主要特点：工作压力为0~0.5mpa，不可调；流量为0-10l/min可调；墙插式氧气吸入器的流量计采用浮标式流量计，流量计刻度指示可以选择0~10l/min，也可以选择0~15l/min的刻度；有三种湿化瓶体可供选择，瓶体材料采用高质量耐压透明聚脂材料（polycarbon）；气体快速插头可选择多种标准的插头，包括美标、英标、德标或其它标准，有特殊要求者可根据客户要求要求进行加工定做；有安全阀，在压力超过一定值时，安全阀迅速打开以进行快速泄压；流量计与湿化瓶的连接件可有多种型式供客户选择，依客户的使用喜好而定；流量计采用100%黄铜加工并经镀铬处理