

百捷尿酸分析仪批发 痛风检测仪家用医用送尿酸试条

产品名称	百捷尿酸分析仪批发 痛风检测仪家用医用送尿酸试条
公司名称	郑州明举科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:百捷 功能范围:测人体的尿酸是否痛风 适用范围:家用药店销售礼品配送
公司地址	郑州市金水区商都路销售部QQ941300478
联系电话	15890020612

产品详情

【百捷尿酸分析仪 痛风检测仪产品特点】百捷尿酸分析仪批发 痛风检测仪家用医用送尿酸试条请联系我们的销售人员，下面介绍一下产品的基本特点简介：百捷尿酸检测仪具有良好的尿酸控制，需要一部高质量、准确度佳、简易操作的检验仪,百捷尿酸检测系统套组是您优先的选择，15秒内即显示量测值,自行研发设计，高科技技术-

电化学生物感测方法百捷掌中型尿酸检验系统人性化界面，提供快速量测帮助您定期监控尿酸。

百捷尿酸检测仪应用于：家用，医院，药店销售，礼品配送等

【尿酸检测仪试纸有效期】

未开封：尿酸试纸18个月。具体有效期见瓶身。

开封：3个月

尿酸正常值范围：

儿童正常范围：2.5-5.5mg/dl(0.15-0.33mmol/l)（医院单位：150-330mol/l），

一般男性正常范围：3.4-7 mg/dl(0.2-0.42mmol/l)(医院单位：200-420mol/l)

一般女性正常范围：2.4-6mg/dl(0.14-0.36mmol/l)(医院单位：140-360mmol/l)

当男性血液中尿酸值高于0.42mmol/l;女性高于0.36mmol/l，属于无症状高尿酸血症。

若您以上值超过参考范围，请咨询医师或者医疗人员！！

有关台湾百捷尿酸分析仪批发 痛风检测仪家用医用送尿酸试条的产品清单有：

- 1.尿酸分析仪1台及尿酸分析仪使用者手册1本。
- 2.锂电池 3 V (内含于分析仪) 1颗
- 3.携带包1个
- 4.采血笔1支
- 5.百捷益系列检验系统简易使用指南1张
- 6.分析仪五年服务保证卡1张
- 7.百捷系列分析仪合格证1张
- 8.采血笔操作说明1张

【产品规格】

百捷尿酸分析仪批发，痛风检测仪家用试条【使用说明】

- 1.将尿酸试纸插入分析仪，并按照采血笔使用说明准备好指尖检体。
- 2.将试纸的进血口碰触血液，当听到“ 哔 ” 声后表示进血成功。将试纸进血口离开血液。
- 3.仪器开始倒数计时，完成测试后，分析仪显示出检验的结果。

【适宜人群】

- 1.需要/希望测试尿酸的病人
- 2.正在进行饮食, 运动, 药物治疗或深受痛风 困扰的人
- 3.需要一台能记录和追踪尿酸测试结果的家用多功能检测仪, 以便于更好自我健康管理
- 4.为提升家庭健康管理、便于在家内检测相关数值避免出现家庭成员得相关疾病。

【注意事项】

- 1.请在3分钟内完成检验，否则分析仪会自动关机。
- 2.不要在进血口以外的地方进血。
- 3.每次检验时，血糖试纸血液量至少0.7微升全血；总胆固醇试纸至少10微升全血。
- 4.在同一片试纸上请勿分两次（含）以上采集血液，否则会造成不准确的检验结果。