

# 芸迪牌中心静脉（PICC）导管固定装置

产品名称	芸迪牌中心静脉（PICC）导管固定装置
公司名称	江苏芸众医疗科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品品牌:芸医疗 产品型号:D型 生产备案:苏镇械备20151014
公司地址	无锡惠山经济开发区惠山大道1719-1号1号楼四层A区
联系电话	0510-82300262 15052139206

## 产品详情

### 一、产品概述：

PICC导管就是经外周静脉插管，导管的尖端位于上腔静脉内，PICC导管规定可以最长留置1年的时间,适用于缺乏外周静脉通路的患者、需要长期静脉输液的患者、胃肠外营养药物治疗等患者。PICC导管可以减少穿刺次数、避免药物刺激损伤外周静脉、减少并发症如：渗出、外渗等症状。但PICC导管一旦松动和脱落，就有可能造成导管进入体内，越滑越深从而进入心脏，非常危险。

在导管护理中，简单的操作方法和病人的舒适度已变得越来越重要，江苏芸众医疗科技有限公司针对此类导管研发生产的“芸迪”牌PICC导管固定装置就可以解决以上难题，带给您普通薄膜敷料、无纺布、纱布及胶带所无法比拟的众多优越性。

PICC导管固定装置采用3M胶及真丝材质制成，在十万级净化车间中经过无菌包装而成，透气安全，防止细菌滋生。产品遵循OSHA推荐的无缝固定建议，实现了PICC导管的无缝固定，其飞机翼可以牢牢的卡在专用的固定装置内，减少了创伤，防止导管滑脱移位，减少与缝合固定相关潜在的并发症，改善了患者的舒适度与安全性，杜绝了临床工作者在加药过程中的针刺风险，减少了病人的痛苦。

目前很多医院还未引进此类产品，还是使用传统的医用胶布进行导管固定，增大了医护人员工作量也增加了医院胶布等消耗品的用量，增加了医院资金消耗，并且容易导致意外脱管的发生。针对这块市场的空缺，“芸迪”牌PICC导管固定装置符合护理规范要求，可以更好更快的开发进院。

### 二、产品优势：

- 1、有效减少与缝合/胶带固定相关的可能发生的并发症；
- 2、无需缝合固定，提高患者的舒适度与安全性；

- 3、避免针刺伤的风险；
- 4、限制导管的移动，减少各种并发症的发生；
- 5、增加导管的留置时间；
- 6、减少科室胶布等消耗品的用量。

### 三、产品使用步骤：

- 1、打开导管固定装置无菌包；
- 2、缺口对准穿刺孔，放置思乐扣固定垫；
- 3、导管固定翼上的缝合孔安装在思乐扣上；
- 4、按住固定垫的下方和导管，锁死固定器；
- 5、依次撕下固定垫背纸并将固定垫贴在皮肤上。