

医院专用输液滑轨A永嘉医院专用输液滑轨A医院专用输液滑轨厂家

产品名称	医院专用输液滑轨A永嘉医院专用输液滑轨A医院专用输液滑轨厂家
公司名称	衡水赫轩防护建材有限公司
价格	45.00/套
规格参数	品牌:赫轩 工艺:氧化 类型:输液滑轨
公司地址	景县
联系电话	15103188468

产品详情

医院专用输液滑轨A永嘉医院专用输液滑轨A医院专用输液滑轨厂家

产品名称：医院专用输液滑轨 医院专用输液滑轨是为了减轻医护人员劳动强度而设计、制造的性能优良，是输液换代产品。本产品符合ISO9001：2000和ISO13485：2003的标准。它主要用于医院的病房、监护室、抢救室、手术室、治疗室等。医院专用输液滑轨主要由轨道、滑车、吊架等三部分组成。

KY/S型天轨输液架，由轨道、滑车、吊架三部分组成。能全方位移动,选择输液最佳位置。

是目前医疗单位普遍采用的换代设备。广泛应用于住院病房及门诊急诊室。

轨道：铝合金材质，白色亚光色泽，有O型、U型、直型、三种形式。

滑车：工程塑料注压成型。在轨道上任意移动，负重后自行锁定。

吊架：挂杆下端有4个挂钩，杆长可随意调整，选定位置后自行锁定。

医院专用输液滑轨安装指南：1、首先确定输液天轨的安装位置，一般安装在病床中央的天花板上。需注意避开灯和风扇，手术室安装时应注意避开吊塔和无影灯。

2、测量所购天轨输液架的轨道安装孔孔距，用 8冲击钻头在天花板上钻出深度大于50毫米的孔，打入 8塑料膨胀（注意塑料膨胀打入后应与天花板平齐）。3、将滑车装入轨道内，用M4×10自攻螺钉将塑料封头安装轨道两端（O型轨无堵头，其接头处应平整对齐，保证滑车能在轨道内自由滑动）。然后用M4×30平头自攻螺钉将轨道安装在天花板上。

4、安装完毕后，将吊杆挂在吊车挂钩上，检查其运转及其他性能。使用说明：使用时，请将吊架挂在滑车钩内，轻轻举动吊架，带着滑车到预定位置后释放，此时滑车自锁于该处，将药瓶挂在挂勾上。如需调节挂勾高度，请用手握住吊杆最下端两个不锈钢装饰球，稍用力使两球的距离靠拢，同时上下移动滑到预定位置后放开按钮，吊杆便自动锁定并固定在这一高度。

用毕后，可将吊杆拿下存放。注意事项：

