

# 全自动血液融浆机CYRJ-8D技术特点

产品名称	全自动血液融浆机CYRJ-8D技术特点
公司名称	杭州川一实验仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:川一仪器 型号:CYRJ-8D 产地:浙江
公司地址	浙江省杭州市余杭区南苑街道临东路172-2号409 A室（注册地址）
联系电话	18158509323

## 产品详情

恒温解冻仪，该机采用液晶屏显示，配套安装自动摇摆系统，自动调控频率，特别是溶化血浆，熔化和摆动同时进行，短时间取出即可使用。适用于血液中心，临床输血科、医院、血液制品生产单位，医学实验室,减少了工序，为抢救病人节省了时间，方便了医务工作者，是理想的血库配套工具。

### THE MAIN CHARACTERISTICS 主要特征：

- 1、全自动恒温解冻仪采用柔性、导热性能良好的材料，将血浆袋和水隔离开，按启动键后，热水自动注入水袋内，从而避免了血浆袋标签脱落、血浆袋破裂、水质污染等事故的发生。
- 2.智能型微电脑进口控制器，数字显示温度，时间。
- 3.加热装置，由自动测温器、温度传感器、传感电缆和高效加热组成。
- 4.控制系统:微电脑全程控制，多重视听报警系统，待机、融化等工作模式。
- 5.内胆采用防菌镜面不锈钢，大敞口水浴便于清洁，排水管连接简便，排水迅速。
- 6.水循环系统进行解冻，迅速、充分、无瞬间温差，温度均衡，不会破坏血浆的有效成分
- 7.节能减排、节约水资源；隔水膜袋使用医用绿色新型材料制成，使用寿命长。 ，保护环境减少污染。

8.断电记忆保护功能，防止断电数据丢失,超温报警自动断电功能，低水位自动报警并自动停止加热

9.内胆均采用聚氨酯发泡技术，保证里面温度的均匀性与波动度

10.温度校准:用标准温度计进行校准

#### TECHNICAL PAPAMETERS 技术参数：

型号	样品数(个)	融化温度	解冻时间	控温精度	电源	功率	循环泵流量
CYRJ-4D	4	30 —45	10-20min	± 0.5	220V/50HZ	2.0KW以上	15L
CYRJ-6D	6						
CYRJ-8D	8						
CYRJ-10D	10						
CYRJ-12D	12						

#### 血液融浆机采购须知：

血液融浆机的主要作用是解冻血浆袋。

融浆机的主要分类有水浴融浆机，气浴融浆机，全自动隔水式融浆机，目前隔水式融浆机在医院检验科得到高度认可，主要原因是水浴化浆时间快；隔水式做到水与血浆袋分离开来，避免了血浆袋标签脱落、血浆袋破裂、水质污染等事故的发生；自动控温，低水位报警灯功能，操作方面。

#### 注意事项、警示及提示性说明

- 1、 严格按照使用说明操作。
- 2、 本解冻仪在工作中不要随意移动。
- 3、 本设备严禁无水操作。
- 4、 溢水口处一定要连接到水桶
- 5、 切勿直接对接自来水进行注水，必须通过进水口自动吸水

#### 安装说明

1. 本机安装无特殊要求，打开包装箱，取出本机，置放平稳。（立式机请将移动轮锁紧）将随机配置的电源线一端插入机器后部的电源插孔，另一端插入交流220V/16A的电源插座上。
2. 4篮，6篮准备40L左右的水，8-12篮准备70L左右的水，将水管一头放入水槽，另一端接机器的进水口即可。将另一根水管连接溢水口处，且令一头放入一个空的水桶，防止溢水到地面。