

美国天伦之乐美腿机新款上市

产品名称	美国天伦之乐美腿机新款上市
公司名称	沈阳金皓程商贸有限公司
价格	990.00/台
规格参数	
公司地址	沈阳市铁西区北一东路30-2号
联系电话	86 024 25115277 13342491877

产品详情

品牌：天伦之乐

型号：tl-fmq-a

功率：70w

额定工作时间：20分钟

功能简介：

全新的按摩设计,可同时按摩你的脚部跟小腿;

附有四副揉捏片,用于按摩你的脚步和小腿;

柔软的揉捏让你体验专业的按摩感受;

强劲的揉捏动作能渗透进入你的脚步和小腿深部的肌肉;

揉捏和震动相结合能带给你舒适的按摩体验,同时达到有益的反射疗法和美腿效果;

设有美腿,轻松,理疗三种自动模式,可依照自己的喜好进行设计;

气压按摩强度设有高.中.低三档;

外观参数

· 长：58.50 厘米 · 宽：43.99 厘米

· 高：53.01 厘米 毛重：22kg 净重：16kg

产品描述

本产品采用独特的深层揉捏、滚动按摩技术，可深入小腿，脚踝和足部的肌肉层，使您全然放松，恢复活力；揉捏和滚动按摩乃针对脚底、脚踝和小腿部位的主要反射区按摩触点，达到更有效的反射效果；强劲有力、渐进式的按摩力度，刺激主要指压穴位，促进血液循环，让您恢复元气，改善整体身心健康。超大的蓝色液晶显示屏，让您一目了然地看清当前按摩手法及产品使用状态。

产品组成说明：

以下是产品功能的几种模式可根据不同人群的爱好的自行选择：

a1开启/关闭按钮（用于打开和关闭程序）

a2自动模式1（用于选择自动程序1）

a3自动模式3（用于选择自动程序3）

a4强度调节按钮（用于选择按摩强度）

a5自动模式2（用于选择自动程序2）

a6自动模式4（用于选择自动程序4）

使用说明

产品使用操作说明：一、将电源插头插入插座。二、

将i/o切换钮设置为“i”以打开产品，控制面板上的开机指示灯将呈蓝色亮起。三、脱去您的鞋子以及腿部和足部的任何其它附属物（例如指环或脚链）。注：在第一次开始使用本产品时，您需要穿戴棉质薄袜以便更加舒适。四、舒适地坐在平稳的椅子上。注：请勿使用滚轮椅或转椅。五、

将您的双脚放入足部配件并将您的双腿放在小腿按摩垫之间。六、按下on/off开启/关闭按钮，lcd工作状态指示动画显示，按摩器开始以速度3运行。按摩器操作将持续20分钟。20分钟后，产品将自动切换到待机模式（lcd工作状态指示待机显示）。注：您可以通过按下控制面板上的on/off开启/关闭按钮随时停止按摩。请等待直至小腿按摩垫向外移动，然后才能将腿移开。注：建议每天不超过3次按摩。按摩次数过多可能会导致与运动过度类似的副作用（例如肌肉紧张）。注：如果在按摩过程中突然断电，请勿惊慌。应缓慢地将您的小腿向前抬起并轻轻地将您的双脚从按摩器中移出。七、您可以根据自己的喜好通过2种方法调节按摩器：1）您可以利用强度调节按钮从5种强度中选择1种。2）您可以利用自动按摩程序按钮从4种自动按摩程序中选择1种。您选择自动程序开始闪动指示。八、您可以任意调整自己的脚底、脚后跟、脚趾和小腿的位置，以达到最舒适的按摩效果。如果您要集中按摩脚趾，则请移动您的双脚，使脚趾尽量与前滚轴完好接触。如果您要集中按摩脚后跟，则请移动您的双脚，使您的脚后跟尽量与后滚轴完好接触。九、使用之后，请通过将i/o设定至“o”以关闭产品并从插座中拨除电源插头。

包装描述

· 包装高：43.99 厘米 · 包装重：16,841.80 克

· 包装长度：57.99 厘米 · 包装宽度：53.01 厘米