

「医院病床」-医院专用病床-医院专用病床价格

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 「医院病床」-医院专用病床-医院专用病床价格 |
| 公司名称 | 衡水宇晨医疗器械有限公司 |
| 价格 | 131.00/张 |
| 规格参数 | 品牌:宇晨 型号:1900*900*500 产地:衡水 |
| 公司地址 | 河北省衡水滨湖新区彭杜乡北田村 |
| 联系电话 | 15369860704 |

产品详情

医院病床A医院专用病床A医院专用病床价格

病床用途介绍；

病人或重度残疾人在家康复、住院休养时所用到的床。主要以实用性为主。以床头床尾、床腿、床板床垫、左右折叠护挡、静音脚轮、一体餐桌、防褥疮气泵托盘、置物架为组件。具有多项护理、监测体重、负压接尿、起背、就餐、移动、休息、尿床报警、康复、被动运动、站立等功能。有普通病床和多功能病床。病床也可称为病号床、医疗床、多功能护理床等，是病人在休养康复治疗时使用的床，主要使用场合有各大医院、乡镇卫生院、社区卫生服务中心、康复机构、家庭病房等。

病床安装步骤:

- 1、脚轮，有两个带制动闸，把带有制动闸的两脚轮对角安装在床架床腿上的螺孔内；再把剩余的两个脚轮安装在其余两个床腿的螺孔内。
- 2、背位床面的安装：将背位床面与床架用背框销轴连接好，再把销轴用开口销锁好。
- 3、床头的安装：分别将床头对准背位床面两侧的孔位插入，拧紧两侧的紧固螺丝。
- 4、背位丝杠的安装：向上推起背位床面至90度角，将背位丝杠带有螺丝的一端拧入背位床面底部的丝杠支撑座再把丝杠下支撑座与床体大架的U字用销轴连接在一起，再用开口销把销轴锁好。
- 5、侧位丝杠的安装：侧位丝杠的安装与背位丝杠的安装相同，只需轻抬侧位床面，将侧位丝杠下撑座与床体按下U字用销轴连接起来，再用开口销把销轴锁好。然后按下侧位控制按钮将侧位床面置水平位置。

- 6、足位床面的安装：首先将足位床面翻过来，把孔管与孔管上支撑座用销轴连接在一起，用开口销锁好。再回旋孔管滑套支架两侧的螺丝，把孔管滑套两侧孔对准支架上的螺丝，用扳手拧紧螺丝。拿起足位床面与大腿位床面的连接孔对接用足框销轴穿好，再用开口销锁好即可。
- 7、足位护栏的安装：把两个足位护栏分别紧固到足位床面的安装孔内，穿上螺丝拧紧即可。
- 8、安全带的安装：取出安全带，绕过头位床面的软垫，穿过头位床面背后的两个限位孔即可。