

过氧化氢干雾灭菌系统

产品名称	过氧化氢干雾灭菌系统
公司名称	张家港小助手贸易有限公司
价格	.11/台
规格参数	品牌:欧克斯菲姆 型号:Nocospray 2 产地:进口
公司地址	张家港市金港镇港华路与老张扬公路交界（注册地址）
联系电话	18921966176 18921957379

产品详情

工作原理 (价格不是实价，请以您需要的情况咨询后报价。供货时间以当天为准。)

将可完全降解的生物消毒液安装在干雾喷散器上，通过内部涡轮高速旋转以电离方式将 H_2O_2 分裂成活性原子团OH - 自由羟基。巴黎中央理工学院工程师Arnaud 和药剂博士Thierry 两兄弟在 2003 年研发 3 灭菌原理 1、大量的OH - 自由羟基攻击微生物或病毒的膜脂、DNA和 其他重要的细胞结构，从而杀死微生物或病毒病菌，羟自

由基在等离子交换过程中生成安全无毒的水分子和氧分子。4 灭菌原理 2、大量的OH - 自由羟基和Ag+（部分消毒剂含有）共同作用下使微生物或病毒本身

的氯离子转变成活性氯，从而杀死微生物 或病毒病菌。5 欧菲姆克干雾灭菌 消毒的优点？

干雾微粒小达到5微米以下，扩散性好，用量小，空间均匀好，在难以到达的地方也有很好的空间和表面接触效果，对黑色枯草能够达到6个Log的杀灭效果。

？消毒时间短，可操作性强，主动排残，自动检测残留浓度，只需要2-3个小时即可完成整个杀菌流程。

？灵活，可以轻松移动，满足不同空间要求。

？材料相容性好，对如电脑主机、手机、打印机等敏感电子产品没有影响；对绝大多数金属材料和非金属材料兼容性良好。

？代替，腐蚀性小，无毒性，暴露于环境中的汽化过氧化氢分子自动分解为无毒无害的水蒸气和氧气，从而保证环境的安全。

？验证资料齐全，符合药典、新版GMP规范要求，易于通过新版GMP。Gazeous: $H_2O_2 \rightarrow 2(OH) \rightarrow H_2O + \frac{1}{2}O_2$ 无腐蚀 6 欧菲姆克 (Oxypharm) 过氧化氢干雾灭菌器强大的性能

？强大的杀菌能力，能杀灭包括病原菌（支原体、衣原体、立克次氏体）、芽孢、大肠杆菌、分枝杆菌、真菌、细菌繁殖体等病原微生物

？根据不同型号的消毒液（产品），用户可根据自己的需求选择；如杀毒

灭菌、除臭去异味、灭蚊、杀臭虫跳蚤杀螨虫和飞/爬行昆虫等，可有效对付各种虫类引起的过敏反应 7

欧菲姆克 (Oxypharm) 过氧化氢干雾灭菌器应用领域 医疗领域：

手术室、病房、化验室、牙科诊所、救护车、血站等

公众领域：养老院、幼儿园、宠物饲养场所、餐厅、健身会所等

生产领域：制药车间洁净室、医疗器械、食品加工中心等 8 欧菲姆克 (Oxypharm)

过氧化氢干雾灭菌器主要机型 Nocomax 用来处理500 到20000 立方米的空间的灭菌 Nocospray 2
用来处理10 到1000 立方米的空间的灭菌 9 欧菲姆克 (Oxypharm) 过氧化氢干雾灭菌器-Nocospray 2
技术参数 功率：1100瓦 转速：22000转/分钟 雾化速度：80米/秒 设备重量：5.9公斤 手提方式，方便转移
50 m m³ 3 空间的灭菌程序 雾化扩散时间3分钟 持续杀菌时间30分钟 总共灭菌时间33分钟