

过氧化氢干雾灭菌系统

产品名称	过氧化氢干雾灭菌系统
公司名称	苏州鸿基洁净科技股份有限公司
价格	88.00/台
规格参数	品牌:欧菲姆 型号:Nocospray 2 产地:进口
公司地址	苏州工业园区扬和路创投工业坊15A
联系电话	0512-58327008 18921966176

产品详情

工作原理 (价格不是实价，请以您需要的情况咨询后报价。供货时间以当天为准。)

将可完全降解的生物消毒液安装在干雾喷散器上，通过内部涡轮高速旋转以电离方式将 H₂O₂ 分裂成活性原子团OH - 自由羟基。巴黎中央理工学院工程师Arnaud 和药剂博士Thierry 两兄弟在 2003 年研发 3 灭菌原理 1、大量的OH - 自由羟基攻击微生物或病毒的膜脂、DNA和

其他重要的细胞结构，从而杀死微生物或病毒病菌，羟自

由基在等离子交换过程中生成安全无毒的水分子和氧分子。4 灭菌原理 2、大量的OH -

自由羟基和Ag+ (部分消毒剂含有) 共同作用下使微生物或病毒本身

的氯离子转变成活性氯，从而杀死微生物或病毒病菌。5 欧菲姆克干雾灭菌消毒的优点？

干雾微粒小达到5微米以下，扩散性好，用量小，空间均匀好，在难以到达的地

方也有很好的空间和表面接触效果，对黑色枯草能够达到6个Log的杀灭效果。

？消毒时间短，可操作性强，主动排残，自动检测残留浓度，只需要2-3个小时即可完成整个杀菌流程。

？灵活，可以轻松移动，满足不同空间要求。

？材料相容性好，对如电脑主机、手机、打印机等敏感电子产品没有影响；对绝

大多数金属材料和非金属材料相容性良好。

？代替，腐蚀性小，无毒性，暴露于环境中的汽化过氧化氢分子自动分解为

无毒无害的水蒸气和氧气，从而保证环境的安全。

？验证资料齐全，符合药典、新版GMP规范要求，易于通过新版GMP。Gaseous: H₂O₂ → 2(OH) → H₂O

+ ? O₂ 无腐蚀 6 欧菲姆克 (Oxypharm) 过氧化氢干雾灭菌器强大的性能

？强大的杀菌能力，能杀灭包括病原菌 (支原体、衣原体、立克次氏体)、芽

孢、大肠杆菌、分枝杆菌、真菌、细菌繁殖体等病原微生物

？根据不同型号的消毒液 (产品)，用户可根据自己的需求选择；如杀毒

灭菌、除臭去异味、灭蚊、杀臭虫跳蚤杀螨虫和飞/爬行昆虫等，可有效对付各种虫类引起的过敏反应 7

欧菲姆克 (Oxypharm) 过氧化氢干雾灭菌器应用领域 医疗领域：

手术室、病房、化验室、牙科诊所、救护车、血站等

公众领域：养老院、幼儿园、宠物饲养场所、餐厅、健身会所等

生产领域：制药车间洁净室、医疗器械、食品加工中心等 8 欧菲姆克 (Oxypharm)

过氧化氢干雾灭菌器主要机型 Nocomax 用来处理500 到20000 立方米的空间的灭菌 Nocospray 2

用来处理10到1000立方米的空间的灭菌9欧菲姆克(Oxypharm)过氧化氢干雾灭菌器-Nocospray 2
技术参数 功率：1100瓦 转速：22000转/分钟 雾化速度：80米/秒 设备重量：5.9公斤 手提方式，方便转移
50 m m³ 3 空间的灭菌程序 雾化扩散时间3分钟 持续杀菌时间30分钟 总共灭菌时间33分钟