

## 芸医疗牌S型用于置管期间沐浴防水固定（上肢）

产品名称	芸医疗牌S型用于置管期间沐浴防水固定（上肢）
公司名称	江苏芸众医疗科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品品牌:芸医疗 产品型号:S1、S2、S3 产品产地:江苏无锡
公司地址	无锡惠山经济开发区惠山大道1719-1号1号楼四层A区
联系电话	0510-82300262 15052139206

## 产品详情

### 一、产品概述：

S型用于置管期间沐浴防水固定（上肢）适用于PICC置管期间PICC置管淋浴，有效保护伤口，预防感染等并发症。

### 二、产品特性：

采用医用硅胶材质，具有抗过敏、无异味、耐拉伸、粘性小，做工精致，品质简约不简单。

护套简约轻盈，穿戴无负重感，防水效果好对手臂及上肢无压迫感，有效保护伤口，预防感染等并发症。

### 三、产品规格：

型号	尺码	上臂周长	下臂周长	体重
S1	S	19-23cm	16-19cm	50-64KG
S2	M	23-28cm	65-79KG	65-79KG
S3	L	28-35cm	80-110KG	80-110KG

### 四、产品使用方法：

- 1、选择合适的型号，先将棉质护套穿上，完全覆盖PICC导管和贴膜。
- 2、用指腹轻轻将硅胶护套穿在棉质护套外面，并完全覆盖棉质护套。

- 3、调整硅胶护套，使之与皮肤完全贴合。
- 4、用指腹拉起防水护套上缘口部，屈肘排空气体。
- 5、冲洗时无大量水滴滞留，不影响粘性，易于风干。
- 6、淋浴结束后用指腹轻柔取下防水护套，清水洗净后阴干，以备下次使用。