

# 一次性输液加热器

产品名称	一次性输液加热器
公司名称	梁山县康乐输液加热器厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	梁山县城利民路南（畜牧局家属院）
联系电话	0537-7331032 13953789513

## 产品详情

该产品利用发热材料制成，遇空气自动升温，不需外接电源，产热稳定，使用方便，安全可靠，无毒副作用。可对输液体加热，解决了因液体冰冷对人体造成的疼痛、寒颤、血管痉挛等不适感。

**使用方法：** 检查包装袋有无破损、过期，打开本产品真空包装袋，让通气孔与空气接触，将输液器输液导管绕于一次性输液加热器凹槽内，旋上加温器的固定卡，调节输液速度2—4ml / min左右，温度可达10 左右。 **使用范围：**

该产品用于临床输液时给液体加热或用于保暖、热敷。 **产品性能：**  
该产品打开包装10分钟后，加热器壳体温度可达50 ，持续温度达3小时以上。

**注意事项：** 1、使用过程中，请勿堵住加热器的透气孔；  
2、输液过程中，如暂停输液，应将本产品取下，继续输液时再装上；  
3、当室外温度达到25 以上，请勿使用。 4、请勿将加热器与人体皮肤直接接触，以免烫伤；  
5、不宜加热的药液或血浆请勿使用 6、本产品为一次性使用，用后销毁。  
7、本产品为真空包装，如出现漏气，请不要启封，以便及时调换。 **贮存：**

真空包装后，贮存在无腐蚀性，通风干燥，相对湿度不高于80%的库房内。

保质期：二年