

唾液采集器（旗舰版）

产品名称	唾液采集器（旗舰版）
公司名称	湖南智因至康科技有限公司
价格	25.00/个
规格参数	品牌:核宇生物
公司地址	湖南省长沙县黄花镇机场口社区长沙黄花综合保税区综合大楼二楼218-4（注册地址）
联系电话	18008405601

产品详情

唾液采集器，适用于采集和室温保存唾液以及细胞DNA，可以在室温稳定保存2年以上。保存的唾液后续可以用于DNA的提取和纯化。

唾液采集器，可以用于基因检测等用途，通过提取唾液当中细胞DNA，分析DNA的核苷酸序列，判定基因类型，指导健康生活。

采集唾液具有无创无痛的优点，可用于所有年龄阶段人群，包括老人与婴孩。

在采集唾液DNA样本前的15-30分钟内，一般而言不能进食零食、喝茶、喝酒、喝饮料、吸烟、嚼口香糖等。在收集唾液之前，请放松脸部肌肉，轻揉面颊1分钟左右，便于产生唾液，同时也可以促进口腔黏膜上皮细胞的脱落。此时收集唾液到唾液采集管。

唾液采集方法：

- 1、向唾液收集器的椭圆形收集口中轻轻吐入唾液，收集唾液时应注意尽量避免出现过多的唾沫。
- 2、收集唾液直至收集管中的唾液与唾沫之间的分界面至少达到2ml所示的刻度线。
- 3、将装有保存液的收集器盖子均匀的扣到椭圆形收集口上，扣下时有轻微的喀塔声，同时保存液均匀的流入收集管，则表明盖子已扣好，否则，需要轻轻的打开收集器的盖子，然后再次均匀的扣上，直至保存液均匀流入收集管。
- 4、轻轻甩动DNA唾液收集器，使细胞保存稳定液更加完全的流入收集管。
- 5、确认收集管中液体与上层唾沫之间的分界面达到4ml所示的刻度线。
- 6、收集完毕。