

# 微压2+1煎药包装一体机 中药煎药机 自动熬药包装机

产品名称	微压2+1煎药包装一体机 中药煎药机 自动熬药包装机
公司名称	温州顶历医疗器械有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:鼎历 额定功率:4800W 额定频率:50HZ
公司地址	浙江温州瑞安市塘下海安汽摩配产业基地东区陕 汽云顶内
联系电话	86-057766210226 18958876502

## 产品详情

自动煎药包装机操作方法：

- 1、检查清洗内部污物、异物等，排尽清洗水。关闭所有阀门。
- 2、将药袋放入多孔桶内，适量加水，
- 3、盖上锅盖，接通电源，打开控制盒上的电源开关，按动模式转换钮，进入时间设定状态，设定煎药时间，其大小选择与饮片性质有关，一般饮片中有根、茎、壳、骨等硬物则时间长。然后再按模式转换钮，使显示屏为温度显示。
- 4、按动运行钮，武火指示灯亮，显示屏上温度数值不断升高，属于正常；煎药桶内药液出现沸腾时，显示屏显示100，武火指示灯灭，文火指示灯亮，设定的时间开始记时，期间文火、武火指示灯会交替亮灭，属于正常。（注意：计时时间从100开始，如果沸腾时温度显示没有到100或以上，则仍不记时。）

5、到设定时间后，自动切断加热盘电源，运行指示灯灭，煎药结束。

6、打开锅盖，提起多孔桶，用专用的插件将多孔桶悬空架在桶上，滴出药液，并用附带的专用压盘捶压药袋，挤出药渣中的残存药汁，然后，设定包装包数和包装量，转动出液阀门手柄使其完全打开，接着启动包装机的运行开关，开始包装，第一包有管道内的水，一般不要。

7、药液包装完毕后，立即放入一定清水，如果重复处方继续煎药，则重复以上步骤，若不再煎药，则用水清洗，整理干净以备后用。

#### 自动煎药包装机安装

1、该设备使用时无震动，不需固定安装，只需将设备平稳地安放在工作场地上即可。

2、该设备因具有发热功能，电热元件安置要选择通风良好、干燥、洁净的地方。

3、为便于修理，设备后面应留有左右空间位置。

4、该设备使用中要经常注水及清洗，所以设备安置在上、下水较方便的地方，便于排水。

5、为了保证人身操作安全，必须做好接地保护。同时提醒用户注意使用单相三端电源插座时，应保证电源插座有L标志一端接火线，有N标志一端接零线，有利于设备的电子线路正常运行，调整不受外界干扰。

。