

洋欧耀厂家批发防撞扶手A89走廊安全扶手A扶手价格

产品名称	洋欧耀厂家批发防撞扶手A89走廊安全扶手A扶手价格
公司名称	重庆天一医疗设备有限公司
价格	20.00/米
规格参数	品牌:洋欧耀 型号:89mm 产地:重庆
公司地址	重庆市南岸区光电路18号14幢20-3号
联系电话	15523738098 18580778748

产品详情

品名：防撞扶手89款

面板宽度：89MM

铝材厚度：1.4MM

材质:PVC+铝合金

规格：89mm*36mm

防撞扶手材质

防撞扶手由高分子材料的挤出件、注塑件、防震垫，经过特定设计的型腔结构和铝合金紧配而成；二、防撞扶手用途安装在医院、福利院、养老院、宾馆等公共设施帮助患者、老人步行，内芯优质铝合金专业设计；三、防撞扶手的优点1、防撞扶手采用高聚物外饰：PVC、ABS、防腐、抗菌、护墙防跌倒牢固可靠，美观实用。2、防撞扶手安装维护保养方便，经久耐用。3、色彩型号多样、能满足风格各异的环境所需。4、防撞扶手具备阻燃、抗菌、造型简洁、明快，易于清洁。5、内芯优质铝合金专业设计、坚固合理。6、安装在医院、福利院、养老院、宾馆等公共设施辅助患者、老人步行。防撞扶手配件：铝合金，硬质PVC面盖，防撞条，弯头，支架，膨胀螺栓，弯头，固定螺丝。防撞扶手安装方法：1、安装扶手必备的工具：铝合金切割机，冲击钻（配M12钻头）手电钻（配M头）打磨机，10号和14号套筒扳手，美工刀，卷尺，剪刀，铅笔，记号笔，铁锤等2、安装高度，一般扶手安装到墙上最高处离地为90公分，83公分处打孔。3、量取长度，将安装扶手的一段墙面从左到右量取。4、量好长度后切割铝合金，铝合金长度为（量取的总长减去弯头16公分的长度（一个弯头8公分）减去两边需要留的间距此间距一般是1-2公分5、（钻支架孔位）从地面量取垂直高度83公分处作记号钻孔，埋入膨胀螺丝，左右间距根据实际情况来安排。

- 6、（装弯头）把左右弯头放到铝合金上，做好记号钻孔固定弯头！
- 7、（装铝合金）将上好弯头的铝合金两人放到有膨胀螺丝的墙上，调整左右间距，在对应膨胀螺丝位置的铝合金中心线上钻孔。
- 8、安装固定铝合金（有防撞条的一面朝下），安装防撞条
- 9、（装面盖）用卷尺量从左弯头到右弯头的距离，用切割机锯下量取的尺寸（面盖最好多切1mm），把面盖扣在铝合金上，搽拭干净面盖，安装完毕！