

厂家直销密闭1+1煎药包装组合机 自动煎药 自动包装上门安装

产品名称	厂家直销密闭1+1煎药包装组合机 自动煎药 自动包装上门安装
公司名称	温州顶历医疗器械有限公司
价格	9300.00/台
规格参数	品牌:鼎历 型号:YJ20+BY50-30 用途:煎制中药
公司地址	浙江温州瑞安市塘下海安汽摩配产业基地东区陕 汽云顶内
联系电话	86-057766210226 18958876502

产品详情

密闭煎煮，避免挥发。

挤压装置，提取残留药汁。

数控技术，控制精度高。武火，文火自动装换。

高温时间（ 100 ）自动显示。节省时间，保质期长。提高药效，药味纯正。

煎药机有一个锅，二个锅，三个锅的。

包装机产品特点：煎药、包装一体化，适用于医院、中医门诊、药房、药店。

依据传统煎药方式，先煎、后下均可、武火文火可换，提高有效成份提取。

利用现代化科技密封包装成袋，符合卫生标准。

电脑程序控制，安全、可靠、方便、美观。

提高门诊量，增加饮片销量，防止处方外流。方便患者服用汤药，便于携带、储藏。

告别火煎烟熏，减员增效，一劳永逸。

发扬中医药的发展特点，符合现代化、规范化、标准化要求。

组合煎药机的操作:

1+1、2+1、3+1组合煎药机

煎药的主要步骤与密闭煎药机的基本相同：如果这些机器的各个煎药机构同时煎药时，在操作上有几点需要注意：1、任何时候每个煎药机构下面的出液阀不得同时处于打开状态，防止各煎药机构中的药物相互掺杂；2、每个煎药机构每次将药液煎出后或清洗排放后都要将出液阀门关闭，防止出错；3、打开煎药机构的出液阀门之前，应检查相邻煎药机构的出液阀门和排水阀是否关闭，确认在正确位置后，再继续操作，具体操作步骤如下：

- (1) 掀开锅盖，提出多孔桶，清洗内部污物使清洁，保持所有阀门为关闭。
- (2) 将药袋放入多孔桶内，计算加水量。
- (3) 盖上锅盖，接通电源，打开电源开关设定：“定时煎药”。机器出厂时“设定温度”默认设置105℃，“定时煎药”，默认设置1小时。煎药时间的悬着与医嘱和饮片性质有关，一般饮片中有根、茎、果实、壳、骨等药物则需要的时间长。您还可以通过升高或降低“设定温度”来调节煎药时加热的火力。
- (4) 按“开始”键，工作状态指示灯闪烁指示煎药加热正在进行，“当前温度”数值不断增大。加热过程中，“当前温度”显示继续增大。“当前温度”达到100℃时，“高温时间”计时开始。用户可以根据医嘱来确定继续煎药的时间。“当前温度”达到“设定温度”后，工作状态指示灯恒亮。温度再次下降2度时，继续加热，实现文武火转换。
- (5) 设置的“定时煎药”时间完成，自动切断加热盘电源，运行指示灯灭，煎药结束，机器进入“停止”状态。
- (6) 打开锅盖，提起多孔桶，用药钩和专用的多孔桶支架将多孔桶悬空架在煎药桶上沿，并用附带的挤压手柄挤压药袋，挤出药渣中的残存药汁，然后进入包装操作，根据桶内药液数量设置“设定袋数”和“设定袋长”，转动出液阀门手柄使其完全打开，接着操作包装机的相应按钮，开始包装，一般第一袋含有管道残存的其它药液，应做废弃处理。包装机的具体操作步骤请参照《数控中药液体包装机使用说明书》。
- (7) 药液完全排完包装完毕后，用药钩将多孔桶内药袋取出，立即倒水清洗。
- (8) 清洗完毕，打开排水阀将水排出。

维护与保养:

- 1、每次工作结束后，要用棉布将机器内擦拭干净，呈现本色，保持干净、卫生，不得用金属丝球和其它易脱落的絮丝状物品清洗机器内部，以免异物堵塞管道。
- 2、经常检查锅盖密封胶圈和锁紧手柄，长时间使用后，会出现老化、磨损。出现异常要及时更换。

注意事项:

- (1) 防止烫伤:这些设备具有电热的发热部件，操作人员应穿着有长袖的衣服，带手套接触手轮、手柄、挤压杆锅盖等，以免机器外壳烫伤皮肤；沸腾后的药液温度较高，要防止溅落烫伤取药袋用专用钩子。
- (2) 防止触电：电控盒和机内电气元件切勿溅入液体，以免损坏电器或造成触电事故。

(3) 防止管路堵塞：机器使用前请扎紧煎药袋口，确保煎药袋外部没有药渣。机器使用后必须用足够的清水清洗。

(4) 防止死机：电源开关不要快速频繁启停，以免电脑控制系统受干扰而死机，甚至造成电路元件损坏。

(5) 严禁使煎药机构加热干烧，以免烧坏设备并防止引起火灾。使用时请勿将“设定温度”设置过高。防止引起火灾或爆炸。

(6) 本设备在操作运行实际注意安全用电外，小心手指被机器夹伤。除操作人员外严禁让非操作人员或儿童代替操作。压力表、安全阀工作满一年后，用户自行检测。用户发现问题后，通知厂家进行更换。

主要技术参数

产品型号 YB50-300

包装能力 (袋/min) 8

袋装容量 (ml) 60~280 (可调)

额定电压 (V) 220

总功率 (W) 800

外形尺寸 (mm) 570*650*1220

包装桶容量 (L) 20

整机重量 (kg) 45

产品型号 MYJ20/1+1

额定电压(V) 220

总功率 (W) 2000+800

外形尺寸 (mm) 590*460*1233

煎药机容量 (L) 20

整机重量 (kg) 45

阿里：顶历医疗