

# 床单位臭氧消毒机

产品名称	床单位臭氧消毒机
公司名称	南昌市三净净化设备有限公司
价格	18.00/台
规格参数	品牌:阿尔森 型号:CDX-S1000 产地:南昌
公司地址	江西省南昌市西湖区桃花镇老洲村（注册地址）
联系电话	15979039940 15070012542

## 产品详情

本机器采用金属阻燃材料

阿尔森牌YF/CDX-S1000床单位臭氧消毒机

操作流程示意图

- 1、将床单、被褥、枕头等物品平铺在待消毒的床位上。
- 2、将消毒床罩打开，把待消毒床上用品罩住，床罩的四周压实在床垫底下。
- 3、把消毒器的气管从机器上摘下，并把消毒罩气嘴打开，然后将连接器插入打开的气嘴中。
- 4、将消毒机接上电源，打开机器电源开关。此时液晶面板点亮。选择用户模式，再根据需要选择“单床”、“双床”后点“开始”即可全自动完成消毒。（自动有黑点靠近为自动模式，手动有黑点靠近为手动模式，正常建议用自动模式）

注意事项：

电源线插在机器背后下方插座上，看是否插入可靠，如可靠后才使用；

消毒前检查消毒罩是否有破损，有破损者不能使用。

使用消毒床罩消毒时必须确保气管接头与床罩气嘴完全接合无误，并保证床罩四周完全压入床垫底下。

不得在机器工作时带电拔出电源插头；

消毒完毕，需先关闭消毒机电源开关，后拔出电源插；

不得将设备放在精密仪器旁边和强电场下，以免电磁场干扰；

为了保障人身和设备安全，请注意将设备保护接地线良好接地；

本机臭氧发生器为高频电压，特殊密封部分，用户不得自动拆卸，如有问题请与本公司联系；

检验合格后的产品应储存在干燥、通风、无腐蚀性物质的库房中；

机器使用寿命：五年，使用20000小时后需报废处理；

消毒完成后封好床罩封口，床罩建议患者使用病床时再拿走；

传染患者建议使用一次性床罩防止交叉感染。

## 日常维护保养

消毒气管、消毒床罩须随时检测，如有破损及时修复或更换。

机器表面的日常清洁：使用蘸有中性清洁剂的湿布清洁机器外壳，面板和消毒气管可用酒精擦洗，但不允许将液体倾倒在机器上清洗，不允许使用有腐蚀性液体或溶剂清洗本设备。

长期停放时间内的维护、保养：拔下机器电源线。