

厂家直销密闭煎药机40L自动煎药机熬药机 密闭煎煮 抽出机

产品名称	厂家直销密闭煎药机40L自动煎药机熬药机 密闭煎煮 抽出机
公司名称	温州顶历医疗器械有限公司
价格	5800.00/台
规格参数	品牌:鼎历 型号:YJ-40 用途:煎中药
公司地址	浙江温州瑞安市塘下海安汽摩配产业基地东区陕 汽云顶内
联系电话	86-057766210226 18958876502

产品详情

密闭煎煮，避免挥发

挤压装置，提取残留药汁

数控技术，控制精度高 武火、文火自动转换

高温时间（《100）自动显示 节能省时，保质期长

提高药效，药味纯正

密闭煎药机使用步骤:

- 1、首先逆时针旋转挤压杆手轮，直到转不动为止，然后将压紧锅盖的锁紧柄按逆时针方向旋转松开，掀开锅盖，提出多孔桶，清洗内部污物、异物等，所有阀门保持关闭。
- 2、将药袋放入多孔桶内，计算加水量，向锅内加水。
- 3、顺时针方向拧紧锁手柄，打开压力表下部连接的排气阀。

4、接通电源，打开电控盒上的电源开关，将“设定温度”设置在100~115℃，使当前温度达到设定温度时压力指示在0.1Mpa~0.15Mpa之间，“定时煎药”设置完毕。温度和时间设置与医嘱和饮片性质有关系，一般饮片中有根、茎、壳、果实、骨等硬物需要的温度高时间长。

5、按“开始键”加热，加热指示灯闪烁，正常时“当前温度”显示的值不断增大；“当前温度”到80左右时，排气阀门冒出少量热气，应立即关闭排气阀门。“当前温度”达到100℃时“高温时间”计时开始。用户可根据药物针对的疾病来确定继续煎药的时间，解表药“高温时间”满10分钟已经煎好，滋补类药“高温时间”最少不少于25分钟。加热过程中“当前温度”值升高，压力表指示压力升高压力最高不可超过0.1Mpa。如遇压力应立即降低“设定温度”或者打开排气阀泄压以确保安全。

6、“当前温度”达到“设定温度”后，蜂鸣器发出的笛声。智能控制加热盘自动桶断电，保持恒温，运行指示灯保持恒亮。当“定时煎药”时间完成后，再次发出笛声，运行指示灯灭，自动切断电源，完成煎药工作。

7、停止煎药后，顺时针旋转挤压杆手轮到转不动为止，关闭排水阀后，再慢慢打开出液阀门，药液自动送到包装机，同时可反复旋转手轮挤压药渣直到药渣中药液完全挤出，关闭出液阀门。

8、打开排气阀门，使压力表指针复位到零。逆时针旋转挤压手轮，直到转不动为止，松开锁紧手柄，掀开锅盖，用钩子将桶里药袋取出，立即倒入清水清洗。在压力表指针没有复位到零以前，严禁松动锁紧手柄掀开锅盖，以防止发生伤害事故。

9清洗:将污垢清除掉，用水清洗，显出不锈钢亮色。然后打开排水阀将废水排出，盖上锅盖，排气阀保持开启状态。

阿里：顶历医疗