

「医疗床」-医疗床厂家-医疗床生产厂家

产品名称	「医疗床」-医疗床厂家-医疗床生产厂家
公司名称	衡水宇晨医疗器械有限公司
价格	131.00/张
规格参数	品牌:宇晨 尺寸:1900*900*500 产地:衡水
公司地址	河北省衡水滨湖新区彭杜乡北田村
联系电话	15369860704

产品详情

「医疗床」-医疗床厂家-医疗床生产厂家

医疗床用于:家用医疗床，医院医疗床，老人医疗床，多功能医疗床，

医疗床，是指使用于人体的器具或者其他物品，其用于人体体表的作用不适用药理学、免疫学或者代谢的手段获得，但是可能有这些手段参与并起一定的辅助作用；其使用旨在达到下列预期目的：（一）对疾病的预防、诊断、治疗、监护、缓解；（二）对损伤或者残疾的诊断、治疗、监护、缓解、补偿。

安全使用注意事项

- 1、多功能电动医疗床使用前，首先应检查电源线是否接插牢固。控制器线是否可靠。
- 2、控制器线性传动器电线、电源线不得置于升降连杆及上、下床架之间，以免电线被剪断，造成人身设备事故。
- 3、背板升起后，病人倒卧在面板上，不准推行。
- 4、人不能站在床面上跳跃，背板升起时，人坐在背板上及站在床面板上，不准推行。
- 5、万向轮制动后，不准推动及移动，只有松开制动后方可移动。
- 6、不准横向推行，以免提升护栏损坏。
- 7、路面不平不能推行，以防多功能电动医疗床万向轮损坏。
- 8、使用控制器时，控制面板上按键，只能逐一按键完成动作。不准同时按二个以上按键操作多功能电动医疗床，以免产生误动作危及病员安全。

9、多功能电动医疗床需移动时，必须拔除电源插头，将电源控制器线绕好后，方准推动。

10、多功能电动医疗床需移动时，应将提升护栏提起，以免病员在移动过程中跌落而受伤害。电动床移动时，必须二人同时操作，以免推行过程中方向失控，造成结构件损坏，而危及病员健康。

衡水宇晨医疗器械有限公司设在美丽的衡水湖畔，106国道的东侧，北邻京九铁路，地理位置优越，交通便利。

经几年的努力和尽心发展，现公司已具备专业生产和研发各种高、中、低档护理床、老年用品、助残用品以及部分辅助类产品的能力。本公司技术力量雄厚，技术设备精良，品种齐全。

本公司主要生产各种病床、护理床、陪护椅、坐便椅、助行器、拐杖、手杖等产品，设计合理，外形美观。远销全国20多个省市，自治区，深受广大客户好评，得到社会各界广泛赞誉。

我公司将以低廉的产品价格，完善的售后服务和良好的品质信誉，诚信经营、锐意进取，开阔创新，并真诚的愿与各界朋友携手共进，共谋发展。