

# 输液轨道A奉节输液轨道安装A输液轨道安装

产品名称	输液轨道A奉节输液轨道安装A输液轨道安装
公司名称	重庆天一医疗设备有限公司
价格	22.00/米
规格参数	品牌:洋欧耀 型号:u型,直型,O型 产地:重庆
公司地址	重庆市南岸区光电路18号14幢20-3号
联系电话	15523738098 18580778748

## 产品详情

输液轨道产地：重庆形状：直型

材料：铝合金颜色：铝合金金属色/白色烤漆优点：轨道氧化处理，不生锈，收拉轻巧流畅，安全稳固。单位：米规格：30\*20\*1.0mm，30\*20\*1.2mm，32\*26\*1.4mm，35\*23\*1.5mm滑轮：静音滑轮应用场所：医院的病床周围或门诊室，诊疗室等输液轨道1、天轨输液道有直型，也可待制各种异型轨道。2、轨道有多种材料、颜色可供选择，以配合病房整体装修风格。椭圆型轨道采用独特工艺一次加工成型，只有一个结合口，并有强化PVC专用连接件，使整套轨道浑然一体，极大增加了轨道的刚度。在运输、安装过程中不变形。使用时滑动顺畅，承重安全。3、我们的安装不采用射钉枪等临时敷衍方式，而采用塑料膨胀加木螺丝。市场上的塑料胀塞太杂，安全性没有保障。我们自己开模具，制作加厚、材质优良、韧性好的塑料胀塞。100%保证了使用安全。4、优点：轨道氧化处理，不生锈，收拉轻巧流畅，安全稳固。

医用弯曲轨道生产厂家专业订制输液导轨，隔帘轨道的详细介绍：U型轨道，标准规格为1.8m\*0.8m\*1.8mm,轨道截面规格为35mm\*23mm\*1.5mm。优质3036铝合金材质，轨道采用独特工艺一次加工成型没有接口。轨道氧化处理，不生锈，收拉轻巧流畅，安全稳固。

### 输液轨道安装说明

1、首先确定输液天轨的安装位置，一般安装在病床中央的天花板上。需注意避开灯风扇，手术室安装时应注意避开吊塔和无影灯。

2、测量所购天轨输液架的轨道安装孔孔距，用 8冲击钻头在天花板上钻出深度大于 50毫米的孔，打入 8塑料膨胀（注意塑料膨胀打入后应与天花板平齐）。

3、将滑车装入轨道内，用M4×10自攻螺钉将塑料封头安装轨道两端（O型轨无堵头，其接头处应平整对齐，保证滑车能在轨道内自由滑动）。然后用M4×30平头自攻螺钉将轨道安装在天花板上。

4、安装完毕后，将吊杆挂在吊车挂钩上，检查其运转及其他性能。

## 医用输液轨道注意事项

- 1、本品为输液专用器械，使用时切忌用力猛拉、吊挂其它物品或儿童将其当秋千晃动；
- 2、每年应定时检查天轨输液架的安装牢固性、可靠性；
- 3、本产品使用环境应为相对湿度不大于90%，温度在-40 ~ 50 ，无腐蚀性气体 环境中。
- 4、应定时清洁吊杆、吊勾、滑车，确保其随时处于清洁卫生状态；

忠县、璧山、江北、奉节、万盛、洋欧耀、南岸、南坪