

医院输液轨道A氧化输液轨道A医用输液轨道厂家

产品名称	医院输液轨道A氧化输液轨道A医用输液轨道厂家
公司名称	衡水云策塑料制品有限公司
价格	4.00/米
规格参数	品牌:云策 型号:30*20*1.2 产地:河北
公司地址	河北省衡水市景县橡塑基地2排151号
联系电话	15632877556

产品详情

医院输液轨道A氧化输液轨道A医用输液轨道厂家

轨道：铝合金材质，白色亚光色泽，有I型、U型、O型、L型、

规格：30*20*1.2mm/ 32*26*1.4mm/35*23*1.5mm(1.8*0.8*1.8)

I型 长度按照客户要求订做

医院输液轨道产品特点

输液瓶高度调节轻松、灵活、方便、省力、舒适；

一体化防护罩设计，方便清洁，外形更为美观；

专用防落尘装置，无菌洁净手术室、ICU专用防落尘吊架；

吊架多样化设计，可适合不同风格与档次的病房；

吊架可装吊钩与吊筐共用，适用不同输液形式；

吊架下拉扶手符合人体力学要求；

吊杆有多种材料、颜色可供选择，以配合病房整体装修风格；

医院输液轨道安装指南

- 1、首先确定输液天轨的安装位置，一般安装在病床中央的天花板上。需注意避开灯风扇，手术室安装时应注意避开吊塔和无影灯。
- 2、测量所购天轨输液架的轨道安装孔孔距，用 8冲击钻头在天花板上钻出深度大于50毫米的孔，打入 8塑料膨胀（注意塑料膨胀打入后应与天花板平齐）。
- 3、将滑车装入轨道内，用M4×10自攻螺钉将塑料封头安装轨道两端（O型轨无堵头，其接头处应平整对齐，保证滑车能在轨道内自由滑动）。然后用M4×30平头自攻螺钉将轨道安装在天花板上。
- 4、安装完毕后，将吊杆挂在吊车挂钩上，检查其运转及其他性能。

医院输液轨道注意事项

- 1、本品为输液专用器械，使用时切忌用力猛拉、吊挂其它物品或儿童将其当秋千晃动；2、每年应定时检查天轨输液架的安装牢固性、可靠性；
- 3、本产品使用环境应为相对湿度不大于90%，温度在-40 ~ 50 ，无腐蚀性气体 环境中。
- 4、应定时清洁吊杆、吊钩、滑车，确保其随时处于清洁卫生状态。