

朗索血液透析机管路消毒液-柠檬酸消毒液-杭州朗索医用消毒剂公司

产品名称	朗索血液透析机管路消毒液-柠檬酸消毒液-杭州朗索医用消毒剂公司
公司名称	杭州朗索医用消毒剂有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:朗索 规格:5kg/桶 产地:杭州
公司地址	建德市朗索路1号
联系电话	400-820-8736 13764508330

产品详情

朗索血液透析机管路消毒液(25%柠檬酸)

主要成分：

本品是以一水合柠檬酸为主要有效成分的消毒液，一水合柠檬酸含量为（%，w/v） 25 ± 2.5 。

产品特点：

脱钙和消毒（80℃）同时进行，减少操作和等候时间

对不锈钢无腐蚀，可延长血透机使用寿命，降低成本

无刺激性气味，减少呼吸道损伤

无色、无毒，废液可直排

在80℃条件下可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌、医院感染常见菌和细菌芽孢。

适用范围：

专用于带比例混合系统的能加温至80℃的血液透析机管路的清洗和消毒。

使用方法：

用于有比例混合系统的血液透析机管路消毒，通过消毒液连接管吸入柠檬酸消毒液，1份消毒液加24份水

, 在80 条件下作用15min。具体清洗消毒程序按照血透机厂家的使用说明。

产品规格：5kg/瓶

朗索血液透析机管路消毒液(50%柠檬酸)

主要成分：

本品是以一水合柠檬酸为主要有效成分的消毒液，一水合柠檬酸含量为（%，g/100ml） 50.0 ± 5.0 。

产品特点：

脱钙和消毒（80 ）同时进行，减少操作和等候时间

对不锈钢无腐蚀，可延长血透机使用寿命，降低成本

无刺激性气味，减少呼吸道损伤

无色、无毒，废液可直排

在80 条件下可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌、医院感染常见菌和细菌芽孢。

适用范围：

专用于带比例混合系统的能加温至80 的血液透析机管路的清洗和消毒。

使用方法：

用于有比例混合系统的血液透析机管路消毒，通过消毒液连接管吸入柠檬酸消毒液，1份消毒液加49份水（1：50），在80 条件下作用15min。具体清洗消毒程序按照血透机厂家的使用说明。

产品规格：5kg/瓶