

圆形方形医用利器盒

产品名称	圆形方形医用利器盒
公司名称	陕西利康源环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	陕西省西安市莲湖区丰收路双府世家花园西区
联系电话	18702902938

产品详情

利器盒说明书

一、主要功能：

使用利器盒的目的是避免感染，杜绝非安全注射，防止锐器的重复使用。

- 1、收集注射器、输液器等一次性使用物品的针头。
- 2、收集医用小玻璃制品、各类刀片、头皮针、缝合针等锐器。
- 3、收集带血的整副注射器、输血器等接触血液的医用器材。
- 4、其他规定必须放入利器盒的医疗锐器等锐利危险品。

二、特征：

- 1.利器盒采用不含PVC的硬质塑料制造，具备耐穿刺，不渗漏，不易破裂、易于焚烧，封闭后完全不能正常打开的基本性能；
- 2.利器盒整体呈黄色，箱体侧面注明“损伤性废物”
- 3、利器盒能防刺穿，其盛装的注射器针头、破碎玻璃片等锐利器具不能刺穿利器盒；
- 4、满盛装量的利器盒从1.5m高处垂直跌落至水泥地面，连续3次，利器盒不会出现破裂、被刺穿等情况；

- 5、利器盒易于焚烧，不得使用聚氯乙烯（PVC）塑料作为制造原材料；
- 6、利器盒上应印制本规定第五条确定的医疗废物警示标识；
- 7、利器盒规格尺寸可根据用户要求确定。

三、使用方法：

1. 安装利器盒：将盒体与盒盖对接用力下压安装成整体。
2. 左右旋转顶盖上的红色旋转盘，可开启或闭合利器盒，逆时针旋转为开启，顺时针旋转为闭合。
3. 注射器针头的收集：将针头伸入水滴形孔中，在注射器乳头与针头的接口处卡住，轻轻向外下压针筒，注射器针头就自动掉入利器盒内。
4. 输液器的利器部分收集：手握输液器的软管，将利器部分伸入顶盖的大开孔中，用剪刀剪即可，其锐器部分即掉入利器盒内。
5. 刀片或者玻璃等锐器，以及抽输血用的注射器、输液器等带血的污染物品可直接放入顶部大开孔中。
6. 当利器盒被盛满至容积的70%时，应封闭利器盒：顺时针旋转顶盖上的红色旋转盘，听到“咯”的声响后，在红色顶盖的翘起处用力揪一下，整个利器盒即被安全锁定。

四、注意事项：

- 1、使用前必须检查利器盒是否完好无损。
- 2、最多只能装至容量的80%，不得超过警戒线。
- 3、封口要紧实、严密，严禁重新开启。
- 4、遵照预防准则，不要套回针帽。
- 5、不要分离针头和针筒，应将整副针具弃置。
- 6、不要弯曲，毁损或用手直接处置使用后的针头。
- 7、只能用把手小心搬运利器盒，应将利器盒远离你的身体。
- 8、利器盒使用后应放置在安全合适的地方。
- 9、利器盒的外表面不得沾有任何医疗废物，被污染时，应对被污染处进行消毒处理，必要时加一层包装。
- 10、转运中严禁扔、摔等动作，以避免造成包装破损和医疗废物的泄漏

