

# 无影灯手术无影灯原理手术无影灯维护无影灯

产品名称	无影灯手术无影灯原理手术无影灯维护无影灯
公司名称	曲阜市康威医疗器械有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:康威 型号:700 500 产地:山东
公司地址	曲阜市裕隆路129号孔子国际商品交易城111号楼福源西九街43号(注册地址)
联系电话	13012630103

## 产品详情

无影灯怎么维护？

日检：灯泡工作状态(PRX6000和8000)。方法:用一张白纸放在工作区域，如出现弧状暗影，换相应灯泡。  
- 消度手柄到位情况。方法:安装时两声"咔哒"。 -

清洁:用弱碱性溶剂(肥皂水)擦洗外表;避免使用含氯洗液(伤金属)和酒精洗液(伤塑料和油漆)。

月检：主要是检查备用电源系统(电池)是否正常。方法:切断220V电源，看是否启动备用电源。

灯泡寿命：寿命平均1000小时;对于灯座，基本上一年更换一次。

年检：保养四步骤(由持证工程师执行)- 紧固电源线接头(控制盒输入输出处)。各连接处螺丝电刷 -  
调整旋转限位(譬如4000型灯头围绕其灯头臂) 灯泡工作电压(23V AC+DC)各关节刹车 -  
检查悬挂管的垂直性和悬挂系统的平衡性 各部分连接处螺丝的紧固是否正常各关节动作时刹车是否正常  
旋转限位散热效果 灯座灯泡的状态消度手柄的安装 光照度光斑直径。

手术无影灯用来照明手术部位，以地观察处于切口和体腔中不同的小的、对比度低的物体。由于施手术者的头、手和器械均可能对手术部位造成干扰阴影，因而手术无影灯就应设计得能尽量消除阴影，并能将色彩失真降低程度。此外，无影灯还须能长时间地持续工作，而不散发出过量的热，因为过热会使手术者不适，也会使处在外科手术区域中的组织干燥。

我公司主要经营LED无影灯，整体反射手术无影灯，手术床，电动手术床，吊塔等