

# 导管式经期棉条(多量型)盒装

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 导管式经期棉条(多量型)盒装                    |
| 公司名称 | 大连欧派科技有限公司                        |
| 价格   | 26.00/盒                           |
| 规格参数 | 包装规格:1*8*40<br>材质:纯天然棉花<br>种类:卫生巾 |
| 公司地址 | 中国 辽宁 大连市金州区 站前街道龙泉路21号           |
| 联系电话 | 086-041139317867 18525389096      |

## 产品详情

|      |        |    |              |
|------|--------|----|--------------|
| 包装规格 | 1*8*40 | 材质 | 纯天然棉花        |
| 种类   | 卫生巾    | 产地 | 大连           |
| 纸品等级 | A级     | 型号 | 分多量型、普通型和量少型 |

纯棉无纺布、100%棉花、斥水棉线、纸质导管

来自西班牙的100%纯棉花的导管式卫生棉条，环保，可降解，为妇科医学专家、产科医生推荐使用的高端女性经期用品

100%纯天然棉花，精密压制而成，不含合成纤维、漂白剂等化学物质，避免过敏，使用更安全。

100%纸质圆形花瓣式导管设计，便面光滑，植入轻松，避免手指直接接触吸收体，不会改变阴道粘膜酸性，解决了手指置入的不便

吸收体被一层特殊的棉质安全层包裹，有效阻止棉絮残留体内。

拉出线与吸收体紧密缝合，方便取出。

来去轻松，带给您自由，是现代女性的贴心伴侣。

## 使用方法：

- 1.使用前请认真清洗双手，撕开独立包装
- 2.选择你认为舒服、自然的姿势
- 3.深呼吸，一只手轻柔地将阴唇分开；另一只手用中指和拇指捏住导管螺纹状标记处，轻轻地将导管推入到体内，直到推到螺纹标记处为止；推动导管内管，就像注射一样，将吸收体推入体内，拿出纸质导管，让拉出线悬垂在体外
- 4.棉条推入到体内合适的位置时，你不会感觉到它的存在。如果你在放入棉条之后感到任何压力或不适，那是因为棉条没有被放在体内合适的位置。这时，你可以深呼吸并将棉条轻轻地再往里推，或是把它拿出来另外换一个
- 5.轻轻地往外拉拉出线，你就会知道是否到了该换棉条的时间了，如果拉出时棉条不动，就说明棉条还没有饱和，不需要更换
- 6.以推进时同样的角度轻轻地往外拉拉出线即可取出棉条。

## 健康须知：

tss是一种极其罕见的疾病，男性、女性和孩子都有可能感染此病，特别是在手术后，生育中、受伤或经期中。症状包括：头疼、肌肉疼、突然发高烧、呕吐或腹泻，肌肤出现皮疹等，这些症状可能出现在你使用棉条期间或是使用后。如果症状持续不退，请向医生求助。如果你正在使用卫生棉条，拿出来，在没看医生之前不要再使用棉条。如果你已经得了tss，很有可能会再次复发，因此在使用卫生棉条之前你应该咨询医生。